

TA 10

Amplificatore universale per telefono

Istruzioni d'uso




Volume di consegna
Amplificatore telefonico TA 10
Istruzioni d'uso
Cavo di collegamento

Elementi d'uso

1. Regolatore del volume
2. Indicazione di funzionamento "acceso/spento"
3. Interruttore di adattamento
4. Impostazione del suono
5. Scatola di collegamento per filo cornetta
6. Tasto BOOST e LED
7. Scatola di collegamento per cavo telefonico
8. Scatola di collegamento per adattatore (non contenuta nel volume di consegna)
9. Coperchio del comparto delle batterie

Per il funzionamento serve una batteria da 9V (non contenuta nel volume di consegna)

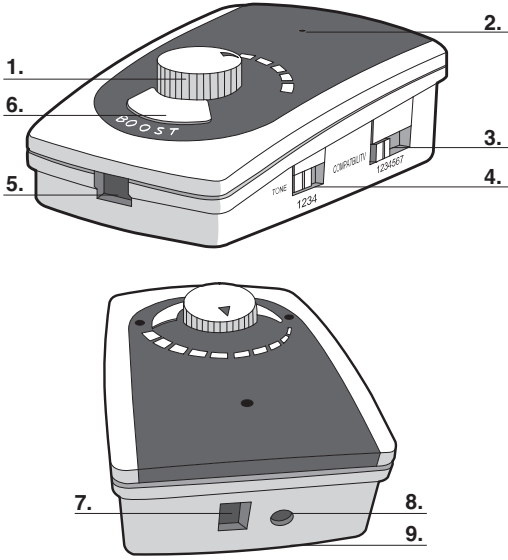

Congratulazioni per aver deciso di acquistare un amplificatore telefonico TA 10. Quest'apparecchio è compatibile con tutti i telefoni con cavo in cui il filo di collegamento con la cornetta può essere inserito su entrambi i lati. TA 10 ottimizza il suono e aumenta il volume delle chiamate in arrivo, facilitando dunque alle persone con udito danneggiato la conversazione telefonica.

Istruzioni di sicurezza

Attenzione: Con quest'apparecchio il Suo telefono riesce a riprodurre anche volumi molto alti con l'amplificatore attivato e con il dispositivo di regolazione del volume impostato al livello massimo. Prestare molta attenzione nel cambio tra utenti con udito normale e con udito ridotto.


- Legga con attenzione queste istruzioni d'uso e Le conservi per bene.
- Colleghi esclusivamente accessori ammessi.
- Non utilizzi l'apparecchio al di fuori di edifici. Non lo posizioni vicino all'acqua, ad es. vicino a una vasca da bagno, lavatrice, lavabo da cucina, in locali umidi o vicino a una piscina.
- Scolleghi sempre il cavo di collegamento estraendolo dalla presa, mai tirando il cavo.
- Non utilizzi l'apparecchio con un cavo, una presa o l'involucro difettosi, se constata una funzione errata o l'apparecchio è caduto. In questo caso si rivolga al Suo rivenditore per la verifica o eventualmente la riparazione dell'apparecchio.
- Utilizzi solo le batterie indicate nelle istruzioni d'uso o l'adattatore ivi indicato (non contenuto nel volume di consegna). Non getti mai le batterie nel fuoco - potrebbero esplodere.
- Utilizzi eventualmente solo l'adattatore raccomandato (non contenuto nel volume di consegna) e faccia attenzione che l'accesso all'adattatore non sia bloccato da mobili o altri oggetti.
- Eviti l'uso di un telefono durante un acquazzone. Si ha il pericolo di una scossa elettrica causata da un lampo.
- Non utilizzi mai un telefono vicino a una fuoriuscita del condotto del gas se vuole informare qualcuno.

Uso corretto


Quest'apparecchio è adatto per essere collegato con un telefono senza fili in cui il filo cornetta collegamento può essere inserito su entrambi i lati. Ogni altro uso non risulta corretto. Modifiche o ristrutturazioni indipendenti non sono ammesse. Non apra mai l'apparecchio da solo e non esegua propri tentativi di riparazione.

Installazione e messa in funzione


1. Inserisca la batteria da 9 volt (non contenuta nel volume di consegna) nel comparto delle batterie sul lato inferiore dell'apparecchio e colleghi TA 10 con il Suo telefono come indicato nell'immagine. Utilizzi eventualmente una moneta per aprire il comparto delle batterie. Utilizzi solo il cavo di collegamento contenuto nel volume di consegna per il collegamento tra TA 10 e il Suo telefono. (**Avviso:** Non consideri l'indicazione di funzionamento "acceso/spento" durante l'impostazione - l'indicazione in questo momento non ha alcuna importanza)
Per sicurezza scollegli sempre TA 10 dal telefono quando cambia la batteria.

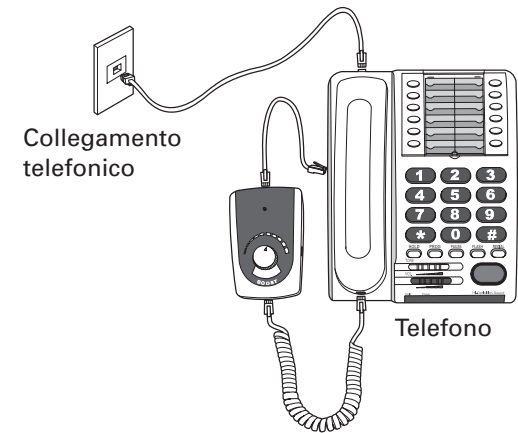

2. Giri il regolatore del volume verso la posizione intermedia. Imposti l'interruttore per l'impostazione del suono nella posizione 2.

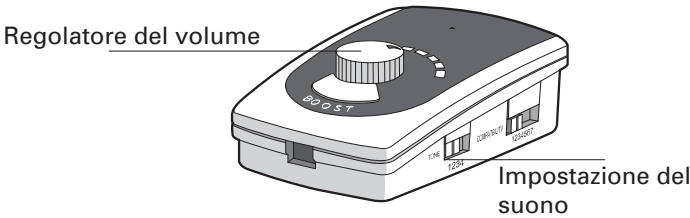


3. Impostare l'interruttore d'adattamento: Questo interruttore ha 7 posizioni. Le posizioni 1 fino a 6 servono per impostare la compatibilità (adattamento al telefono). La posizione 7 funge da "bypass", ovvero per "evitare" la funzione dell'amplificatore. Questa posizione può essere impostata ad es. se persone con udito normale vorrebbero utilizzare il telefono o se l'approvvigionamento elettrico dell'apparecchio non funziona (ad es. con batteria scarica).

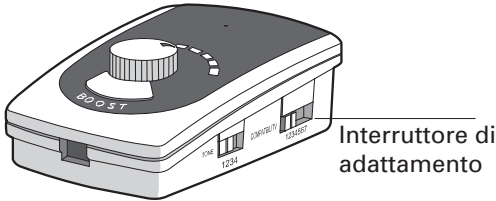


- A. Imposti l'interruttore d'adattamento nella posizione 1 (**Avviso:** Si tratta dell'impostazione più abituale che funziona con la maggior parte dei telefoni. Non consideri l'indicazione di funzionamento "acceso/spento" durante l'impostazione - l'indicazione in questo momento non ha alcuna importanza)
 - B. Alzi la cornetta e verifichi se riesce a sentire il tono di selezione.
 - C. Se non si riesce a sentire chiaramente il tono di selezione, riattacchi la cornetta e imposti l'interruttore nella prossima posizione, ad es. B. 2. Ripeta il passaggio B.
 - D. Se si percepisce bene il tono di selezione, verifichi se può impostare a un livello superiore o inferiore il regolatore del volume. Se funziona, proceda con il passaggio F.
 - E. Se non si riesce a modificare il volume, riattacchi la cornetta e imposti l'interruttore d'adattamento nella prossima posizione. Ripeta il passaggio B.
 - F. Chiami qualcuno e verifichi se potete sentirvi a vicenda.
 - G. Se è soddisfatta/o della comprensione, ha concluso con successo le impostazioni. Prenda eventualmente nota dell'impostazione dell'interruttore di adattamento. Proseguo con il passaggio 4.
 - H. Se non è soddisfatta/o della comprensione, provi altre posizioni dell'interruttore di adattamento fino a che il risultato non corrisponde alle Sue aspettative. (**Avviso:** Esperimenti semplicemente le diverse posizioni dell'interruttore fino a ottenere una comprensione chiara e comprensibile.)
4. Durante un colloquio telefonico può aumentare o ridurre il volume nella cornetta, ruotando il dispositivo di regolazione del volume. (**Avviso:** Se percepisce dei fischi spiacevoli nella cornetta, La preghiamo di ridurre il volume.)


5. Durante un colloquio telefonico modifichi la posizione dell'interruttore per l'impostazione del suono per determinare n quale posizione la qualità di riproduzione del Suo interlocutore è più comprensibile. Se percepisce fischi spiacevoli nella cornetta, La preghiamo di ridurre il volume. Mantenga quest'impostazione anche per il futuro - non la deve più modificare. Prenda eventualmente nota di quest'impostazione.

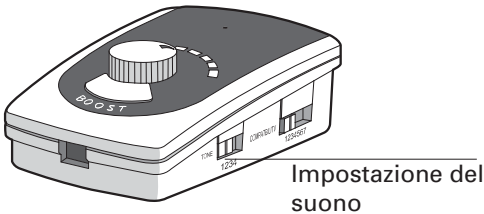

6. Prema il tasto BOOST e lo tenga premuto. Verifichi se la voce del Suo interlocutore viene riprodotta troppo forte e se il LED BOOST lampeggia. Se desidera parlare Lei stessa/o, deve lasciare il tasto, visto che con il tasto premuto la Sua voce non viene trasmessa all'interlocutore.

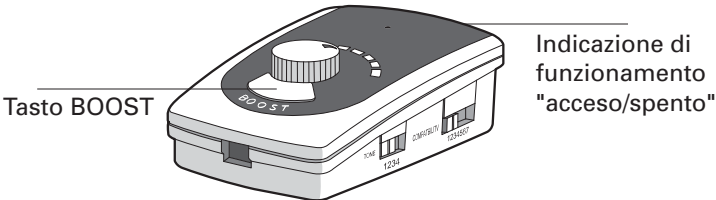

7. L'indicazione di funzionamento "acceso/spento" lampeggia durante un colloquio telefonico. Ca. 8-15 secondi dopo aver riattacato la cornetta e/o se per ca. 8-15 secondi non sono stati constatati rumori/linguaggio si spegne.
8. Una batteria alcalina di 9 V alimenta l'apparecchio per ca. 6-12 mesi se si ha un consumo medio. La preghiamo di non sostituire la batteria, se l'indicazione di funzionamento "acceso/spento" diventa più scura o se il suono nella cornetta peggiora.
9. In opzione può collegare un adattatore di 9 V (non contenuto nel volume di consegna). Questo adattatore esegue l'approvvigionamento elettrico del TA 10. La batteria in questo caso garantisce l'approvvigionamento del TA 10 in caso di mancanza di corrente. Per garantire una funzione sicura, dovrebbe sostituire la batteria ca. ogni due anni. La sostituisca eventualmente se nota che l'indicazione di funzionamento "acceso/spento" non lampeggia in caso di mancanza di corrente o se si utilizza un telefono.

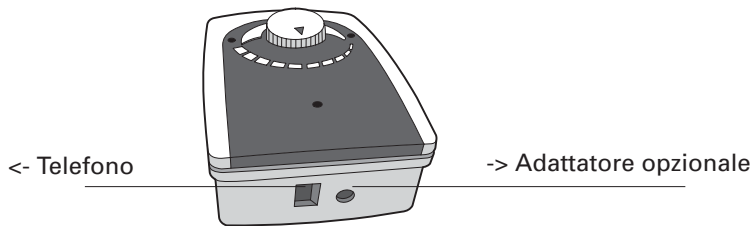

Vendita: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
02/2012 – Edizione 1.1

Ricerca errori ed eliminazione errori

Se ha problemi con l'apparecchio, controlli innanzitutto le seguenti indicazioni o si rivolga al Suo rivenditore specializzato. Nel caso di diritti di garanzia, si rivolta al Suo rivenditore specializzato. La durata di garanzia ammonta a 2 anni.

- Indicazione di funzionamento "acceso/spento" lampeggia solo in modo debole o non lampeggia per niente: Sostituisca la batteria.
- Non riesce a sentire il tono di selezione o il Suo interlocutore e/o il Suo interlocutore non riesce a sentirLa: Controlli la posizione dell'interruttore di adattamento. Se necessario, ripeta le impostazioni come descritto nei passaggi 3, punto A-D.
- Fischi spiacevoli nella cornetta: Riduca il volume o modifichi la posizione dell'interruttore di impostazione del suono.

Dati tecnici

Approvvigionamento elettr.	Batteria alcalina da 9 V (non contenuto nel volume di consegna)
Consumo elettrico	10 mA (tipico); Spegnimento automatico nel caso di silenzio/cornetta riattaccata
Ciclo di vita della batteria	6-12 mesi, a seconda della durata del consumo
Amplificazione senza BOOST	30 dB
Amplificazione con BOOST	45 dB
Tempo di spegnimento automatico	8-15 secondi silenzio (nessun rumore/voce)
Interruttore adattamento	6 posizioni + posizione "bypass" (7)
Indicazioni	Indicazione di funzionamento "acceso/spento" e BOOST
Elementi di funzionamento	Volume, BOOST, suono, Compatibilità
Adattatore opzionale	9 V DC, 300 mA (non contenuto nel volume di consegna)
Temperatura ambiente per il funzionamento	da 0 a 45° C
Temperatura di conservazione	da -20 a 50° C



Smaltimento

Secondo la legge delle apparecchiature elettriche e elettroniche i proprietari di apparecchi usati hanno l'obbligo legale di smaltire separatamente le apparecchiature elettriche e elettroniche usate. Il simbolo qui a lato indica che l'apparecchio non deve assolutamente essere smaltito nei rifiuti domestici! Ha un obbligo per legge di smaltire in modo sicuro accumulatori e batterie presso rivenditori di batterie e presso punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. I materiali d'imballaggio deve smaltirli secondo le prescrizioni locali.



Manutenzione

- Pulisca la superficie dell'apparecchio sempre con una pezza morbida e priva di peluzzi.
- Non utilizzi mai detergenti e solventi.

Garanzia

Gli apparecchi di AMPLICOMMS vengono prodotti e controllati secondo le procedure di produzione più innovative. L'uso di materiali selezionati con attenzione e di tecnologie altamente sviluppate garantisce un funzionamento privo di disturbi e un ciclo di vita lungo. Le condizioni di garanzia non si applicano se la causa del disturbo nell'apparecchio va ricondotta al gestore della rete telefonica o a un eventuale impianto secondario interconnesso. La garanzia non si applica alle batterie ricaricabili, gli accumulatori o i pacchetti di batterie impiegate nei prodotti. La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. All'interno del periodo di garanzia tutte le carenze riconducibili a errori di materiale o di produzione vengono eliminate gratuitamente. Il diritto di garanzia si estingue dopo interventi del compratore o di terzi. Danni causati da uso o maneggio scorretti, posizionamento o conservazione errati, collegamenti scorretti o installazione errata, forza maggiore o altri influssi esterni non sono contenuti nella prescrizione di garanzia.

Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire parti difettose in caso di reclami e/o di mettere a disposizione un apparecchio sostitutivo. Parti o apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà. Diritti di risarcimento danni sono esclusi almeno che al produttore non si dimostri di aver agito con premeditazione e grave negligenza. Se il Suo apparecchio dovesse evidenziare un difetto durante il periodo di garanzia, La preghiamo di rivolgersi al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio AMPLICOMMS, presentando il Suo scontrino di acquisto. Tutti i diritti di garanzia secondo queste normative sono da far valere esclusivamente presso il rivenditore specializzato. Due anni dopo l'acquisto dei prodotti non si possono più far valere diritti di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio corrisponde ai requisiti della direttiva UE: Direttiva UE 1999 / 5 riguardante gli impianti radio e le installazioni di telecomunicazione e il riconoscimento reciproco della loro conformità. La conformità con la direttiva sopra citata viene confermata con il simbolo CE sull'apparecchio. La dichiarazione di conformità completa la può scaricare gratuitamente dal nostro sito web allo www.amplicomms.com.

