



Felicidades por haber elegido el amplificador de teléfono TA 10. Esta unidad es compatible con todos los teléfonos con cable que se puedan conectar entre ellos a través del cable de auricular y de conexión. El TA 10 mejora el sonido y aumenta el volumen de las llamadas telefónicas entrantes, facilitando así la comunicación para las personas con problemas auditivos.

Indicaciones de seguridad

Cuidado: Este teléfono puede reproducir un nivel de volumen muy alto cuando el amplificador está encendido y el control de volumen está al máximo. Debe tener especial cuidado al cambiar el volumen para los usuarios con audición normal y audición limitada.


- Lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras referencias.
- Sólo utilice accesorios autorizados.
- No utilice la unidad al aire libre. No coloque la unidad en las inmediaciones del agua, por ejemplo, junto a una bañera, lavadora, fregadero de la cocina, en zonas húmedas o cerca de una piscina.
- Nunca desconecte la unidad tirando del cable sino del enchufe.
- No utilice el dispositivo si el cable, el conector o la carcasa presentan daños o defectos o si se ha caído el dispositivo. En este caso póngase en contacto con su distribuidor para que verifique o repare el dispositivo.
- Utilice únicamente las baterías especificadas en el manual o la fuente de alimentación (no incluida) que se indique en el manual. Nunca tire las pilas al fuego, pueden explotar.
- En caso necesario, utilice únicamente la fuente de alimentación recomendada (no incluida) y asegúrese de que el acceso a la fuente de alimentación no esté obstruido por muebles u otros objetos.
- Evite utilizar el teléfono durante una tormenta. Existe el riesgo de descarga eléctrica por impacto de rayos.
- Nunca use el teléfono en las proximidades de una tubería con fuga de gas, si desea notificar a alguien acerca de ello.

Propósito de uso


Este dispositivo es adecuado para la conexión a un cable de teléfono donde el cable de conexión del auricular se enchufe mutuamente. Cualquier otro uso resultará inapropiado. Los cambios o modificaciones no están permitidos. No trate de abrir o repara el aparato por cuenta propia bajo ninguna circunstancia.

Instalación y funcionamiento

1. Coloque una batería de 9 voltios (no incluida) en el compartimiento de la batería en la parte inferior de la unidad y conecte el TA 10 con el teléfono como se indica. Si es necesario, utilice por ejemplo una moneda para abrir la tapa del compartimento de la batería. Utilice sólo el cable de alimentación suministrado para la conexión entre el teléfono y el TA 10. **(Nota:** no preste atención al indicador de funcionamiento "on / off" durante la instalación, ya que en dicho momento resulta irrelevante)
Para su seguridad desconecte el TA 10 del teléfono siempre que desee cambiar la batería.

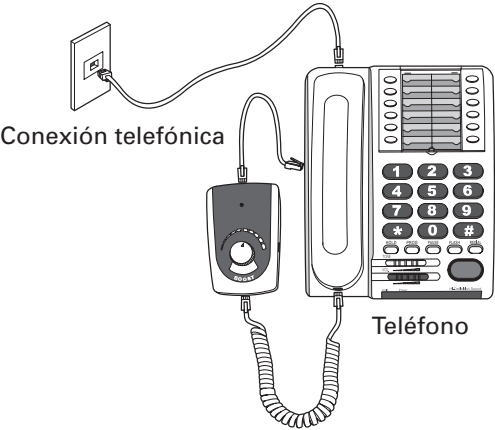

2. Deslice el control de volumen en la posición central. Posicione el interruptor para ajustar el tono en la posición 2

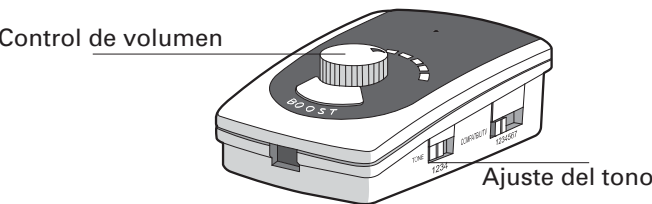


3. Ajustar interruptor de compatibilidad: Esta opción cuenta con siete posiciones. Las posiciones del 1 al 6 se utilizan para establecer la compatibilidad (ajuste telefónico). La posición 7 es un "bypass" y no es aplicable para las funciones normales de amplificación. Esta posición se puede ajustar, por ejemplo, para personas con una audición normal o si la fuente de alimentación del dispositivo deja de funcionar (por ejemplo, por batería vacía).

Contenido de la entrega
Teléfono amplificador TA 10
Manual de instrucciones
Cable de conexión

Elementos de control

1. Control de volumen
2. Indicador "On / Off"
3. Control de ajuste
4. Control de ajuste de tono
5. Toma para el cable del auricular
6. Tecla BOOST y LED
7. Clavija de conexión para el cable al teléfono
8. Clavija de conexión para el aparato de red (no incluido)
9. Tapa del compartimiento de la batería


Para el funcionamiento se requieren baterías de 9 V (no incluidas)

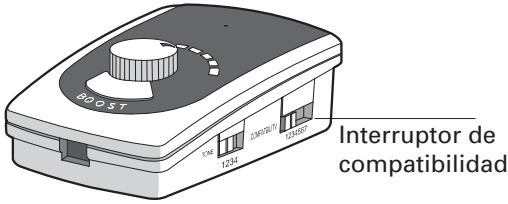


- A. Ponga el interruptor de compatibilidad en la posición 1 **(Nota:** no preste atención al indicador de funcionamiento "on / off" durante la instalación, ya que en dicho momento resulta irrelevante)
- B. Descuelgue el teléfono y verifique si se puede escuchar el tono de marcado.
- C. Si el tono de marcación no se oye claramente, cuelgue el teléfono de nuevo y ponga el interruptor en la siguiente posición, por ejemplo 2. Repita el paso B.
- D. Si el tono se oye claramente, compruebe si puede subir y bajar el volumen del tono con el control del volumen. Si funciona continúe con el paso F.
- E. Si el volumen no se puede cambiar, cuelgue el teléfono y cambie el interruptor de compatibilidad a la siguiente posición. Repita el paso B.
- F. Realice una llamada para comprobar que se puedan escuchar mutuamente.
- G. Si está satisfecho con la comunicación habrá completado la configuración con éxito. Si es necesario, anótese los pasos a seguir para la configuración del interruptor de compatibilidad. Continúe con el paso 4.
- H. Si no está satisfecho con la comunicación, pruebe otras posiciones del interruptor de compatibilidad hasta que el resultado cumpla con sus expectativas. **(Nota:** Pruebe las diferentes posiciones del interruptor hasta que la señal sea alta y clara.)

4. Durante una conversación telefónica puede aumentar o disminuir el volumen del auricular girando el control de volumen. **(Nota:** Si percibe en el teléfono un pitido desagradable disminuya por favor el volumen).

5. Cambie durante una conversación telefónica la posición del interruptor para ajustar el sonido y saber cuál es la posición que ofrece mejor calidad de comunicación con su interlocutor. Si percibe en el teléfono un pitido desagradable disminuya por favor el volumen. Mantenga estas indicaciones para referencias futuras. No necesitará cambiarlas. Si es necesario anótese estas indicaciones.

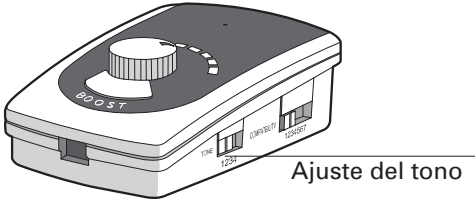



6. Mantenga pulsado el botón BOOST. Compruebe si la voz del interlocutor se oye más fuerte y si las luces del BOOST-LED están encendidas. Si desea hablar debe soltar el botón, ya que al mantener el botón pulsado no se podrá transmitir su voz al hablar.

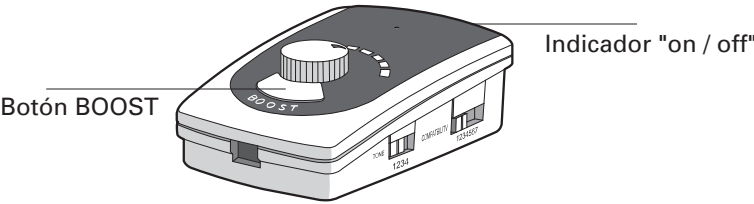

7. El indicador "on / off" se enciende durante la conversación telefónica. Desaparece unos 8 - 15 segundos después de colgar, es decir, si durante estos 8 - 15 no ha percibido ningún sonido/voz.

8. Con un promedio de uso normal la batería alcalina de 9 V tiene una vida de 6 a 12 meses. Por favor, reemplace la batería cuando el medidor de batería "on / off" se oscurezca o cuando el tono del auricular empeore.

9. Si lo desea puede conectar una fuente de alimentación de 9 V (no incluida). Esta fuente de alimentación se encarga del suministro de energía del TA 10. En este caso, la batería asegura el suministro del TA 10 en caso de un corte de energía. Para garantizar un buen funcionamiento deberá cambiar la batería cada 2 años. Cambie también las baterías cuando observe que el medidor de batería "on / off" no se enciende durante un corte de energía o uso del teléfono.

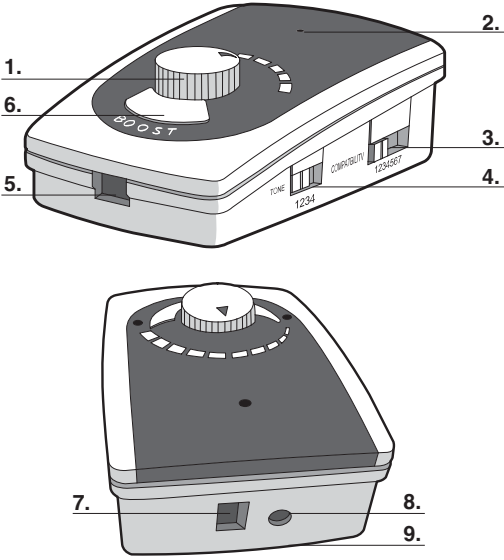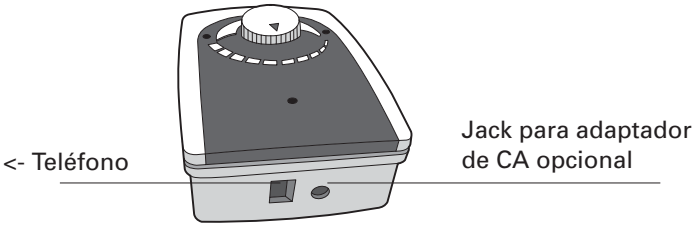

Solución de problemas y reparación

Si tiene problemas con su teléfono consulte primero las siguientes instrucciones. Para las reclamaciones de garantía póngase en contacto con su distribuidor.

El plazo de garantía es de 2 años.

- El medidor de batería "on / off" no se ilumina o lo hace débilmente: cambie la batería.
- No puede oír el tono de marcado ni a su interlocutor o el interlocutor no le oye: verifique la posición del interruptor de compatibilidad. Si es necesario, repita las indicaciones del punto 3, desde A hasta D.
- Pitidos desagradables en el auricular: Baje el volumen o cambie la posición del interruptor para el ajuste del tono.

Especificaciones

Fuente de alimentación	batería alcalina de 9 V (no incluido)
Consumo de corriente	10 mA (típico); apagado automático si no hay voz
Vida de la batería	6-12 meses, dependiendo de la duración del consumo
Amplificación sin BOOST	30 dB
Amplificación con BOOST	45 dB
Apagado automático	Después de 8/15 s. de silencio (Para conservar la vida de la batería) (si no hay sonido / voz)
Posiciones de ajuste del interruptor	6 + "bypass", posición (7)
Mostrar	Indicador de funcionamiento "on / off" y BOOST
Elementos de control	volumen, BOOST, sonido, compatibilidad
Fuente de alimentación opcional	9 V DC, 300 mA (no incluido)
Temperatura ambiente para el funcionamiento	0 a 45 ° C.
temperatura de almacenamiento	-20 a 50 ° C.



Eliminación

Está obligado por la ley a deshacerse de forma adecuada de sus artículos de uso corriente. El símbolo que aparece al margen de su aparato significa que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados por separado de los residuos domésticos.

Debe deshacerse de los dispositivos eléctricos o electrónicos en un punto de recogida autorizado por las autoridades. Debe deshacerse de las baterías en el local que comercializa las baterías o en el contenedor de reciclaje correspondiente de cualquier punto de recogida autorizado. Deshágase del material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de mantenimiento

- Limpie las superficies de la carcasa con un paño suave y sin pelusa.
- No utilice detergentes o disolventes.

Garantía

Los dispositivos AMPLICOMMS son fabricados y probados de acuerdo con los últimos métodos de producción. Los materiales seleccionados y el uso de tecnologías avanzadas garantizan un funcionamiento sin problemas y de larga vida. La garantía no se aplica si la causa proviene de un mal funcionamiento del dispositivo debido a la compañía telefónica o de cualquier centralita privada conectada a la red pública. La garantía no se aplica a las pilas o baterías utilizadas en el producto. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía todos los defectos materiales o de fábrica serán solventados de forma gratuita. La garantía será nula si el comprador o terceras personas manipulan el aparato. La garantía no se aplicará si se producen desperfectos o daños causados por el manejo inadecuado del aparato, la red de conexión y la instalación o por el desgaste natural debido a un mantenimiento y almacenamiento incorrecto del dispositivo o por causas de fuerza mayor o influencias externas. En caso de reclamación nos reservamos el derecho a reparar las piezas defectuosas, sustituirlas o reemplazar el dispositivo. Las piezas o el dispositivo reemplazado deberán ser de nuestra propiedad. Las reclamaciones por daños y perjuicios quedan excluidas, a menos que se demuestre intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante. Si dentro del periodo de garantía el dispositivo sigue mostrando defectos, póngase en contacto con su recibo de compra únicamente en la tienda donde compró su dispositivo AMPLICOMMS. Todas las reclamaciones de garantía conforme a estas disposiciones sólo tendrán validez frente al distribuidor del producto. Los derechos de garantía dejarán de tener validez una vez finalizado el plazo de garantía de 2 años.

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de la UE: Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. La conformidad con la directiva mencionada anteriormente se confirma mediante el símbolo CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web www.amplicomms.com

