



HC-200

Mode d'emploi



Fonctionnalités :

Le nettoyeur d'appareil auditif HC-200 est fourni avec deux embouts d'aspiration de tailles différentes pour une meilleure compatibilité avec les différents modèles d'appareils auditifs.

Couvercle du compartiment à piles

Embout d'aspiration

Bouton On/Off

Compartiment à piles

Éponge de filtrage interne

Embout d'aspiration pour nettoyage interne

Embout d'aspiration pour nettoyage externe

Brosse de nettoyage

Installez quatre piles alcalines AA

comme indiqué:

Placez deux piles AA dans le compartiment du bas et 2 piles AA dans le compartiment du dessus.

(Piles non fournies)

Appuyez pour ouvrir le compartiment à piles.

Retirez le couvercle.

Comment utiliser votre HC-200 :

Attention --- N'UTILISEZ PAS le HC-200 sur vos oreilles.

Le HC-200 n'est destiné qu'au nettoyage de votre appareil auditif. Vous DEVEZ retirer votre appareil de l'oreille !

Nettoyage de la surface

Avec le HC-200 éteint, retirez l'embout conique et remplacez-le par l'embout carré comme dans l'illustration. Brossez doucement la surface extérieure de l'appareil auditif avec la petite brosse de nettoyage.

Utilisez l'embout d'aspiration carré sur la surface extérieure de votre appareil auditif comme on le voit sur l'illustration (Illustration B).

Instruction de nettoyage et de maintenance

Filtre et embout d'aspiration - Dévissez l'embout d'aspiration de l'aspirateur pour retirer le filtre et vider l'eau accumulée. Si besoin, lavez le filtre et l'embout d'aspiration avec de l'eau, séchez-les et réinstallez-les (Illustration C).

Pompe manuelle - Nettoyer uniquement avec un linge doux et sec. N'utilisez pas de solvants, ne la lavez pas au lave-vaisselle et ne la submergez pas dans l'eau.

Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre appareil signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets.

Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit. Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie.

Hotline de service

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet : www.amplicomms.com

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur.

La période de garantie est de 2 ans.

Audioline GmbH

D-41460 Neuss

08/2014 - V 1.0

Mode d'emploi

Nettoyage de la surface

Avec le HC-200 éteint, retirez l'embout conique et remplacez-le par l'embout carré comme dans l'illustration. Brossez doucement la surface extérieure de l'appareil auditif avec la petite brosse de nettoyage.

Utilisez l'embout d'aspiration carré sur la surface extérieure de votre appareil auditif comme on le voit sur l'illustration (Illustration B).

Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre appareil signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets.

Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.



HC-200

Istruzioni d'uso



Panoramica:

L'aspiratore per apparecchi acustici HC-200 comprende due diversi beccucci di aspirazione per l'utilizzo con vari apparecchi acustici.

Coperchio scomparto batterie

Beccuccio di aspirazione

Interruttore on/off

Scomparto batterie

Spugna filtrante interna

Beccuccio di aspirazione per pulizia interna

Beccuccio di aspirazione per pulizia esterna

Spazzola detergente

Installare 4 batterie alcaline AA come indicato:

inserire 2 batterie AA sotto nello scomparto batterie e 2 batterie AA sopra. (Batterie non fornite)

Premere per aprire lo scomparto batterie.

Togliere il coperchio dello scomparto batterie

Utilizzo dell'HC-200:

ATTENZIONE --- non utilizzare l'HC-200 vicino alle orecchie. L'HC-200 serve esclusivamente per la pulizia di apparecchi acustici. Staccare l'apparecchio acustico dalle orecchie prima di pulirlo!

Se necessario, informarsi presso un rivenditore specializzato su come pulire al meglio i propri apparecchi acustici con l'HC-200.

Pulizia del canale dell'apparecchio acustico

- Introdurre leggermente il beccuccio appuntito nel canale dell'apparecchio acustico (come illustrato) e avviare il processo di aspirazione. Non introdurre il beccuccio troppo profondamente nel canale e non esercitare forza. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio acustico. (Illustrazione A)

Pulizia della superficie

- Ad HC-200 spento, togliere il beccuccio appuntito e sostituirlo con il beccuccio largo. Spazzolare leggermente la parte esterna dell'apparecchio acustico con la piccola spazzola detergente.
- Utilizzare il beccuccio largo per aspirare la parte esterna del proprio apparecchio acustico (illustrazione B)

Smaltimento

Vige l'obbligo legale di smaltire correttamente i prodotti di consumo. Il simbolo qui a lato ri-prodotto sul Suo apparecchio indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici o elettronici devono essere smaltiti presso un punto di raccolta di un istituto di smaltimento. Le batterie deve smaltirle presso il rivenditore di batterie o presso i punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. I materiali d'imballaggio devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali.

Garanzia

AMPLICOMMS – Gli apparecchi vengono prodotti e verificati secondo modernissimi processi di produzione. I materiali ricercati e tecnologie altamente sviluppate servono a garantire una funzione perfetta e un ciclo di vita lungo. La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica per le batterie, gli accumulatori o i pacchetti di accumulatori utilizzati nei prodotti. Nel corso del periodo di garanzia tutti i difetti riconducibili a errori di materiale o di produzione devono essere eliminati a titolo gratuito. Il diritto di garanzia termina nel caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni causati dal trattamento o uso scorretto, dal posizionamento o dalla conservazione errati, dal collegamento o dall'installazione eseguita in modo non professionale o da forza maggiore o alte influenze non fanno parte della prestazione di garanzia.

Service Hotline

In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra Service Hotline. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet www.amplicomms.com

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

Audioline GmbH

D-41460 Neuss

08/2014 – V 1.0

4 250711 992804

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso

HC-200

Istruzioni d'uso