





### Vista geral:

O dispositivo de limpeza para aparelhos auditivos HC-200 inclui dois bicos de aspiração diferentes para aplicação em vários aparelhos auditivos.

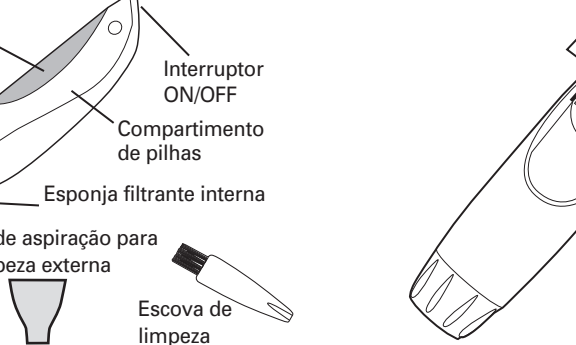

### Primeira utilização:

Insira 2 pilhas AA no compartimento de pilhas em baixo e 2 pilhas AA em cima. (Pilhas não incluídas)

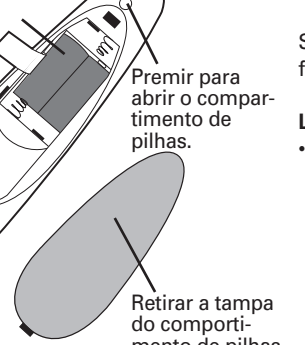


### Como utilizar o seu HC-200:

**AVISO --- não aplicar o HC-200 nos seus ouvidos. O HC-200 só é adequado para a limpeza de aparelhos auditivos. Retirar necessariamente os aparelhos auditivos dos ouvidos antes de limpá-los!**

Se necessário, consulte um comerciante especializado sobre a melhor forma de limpar os seus aparelhos auditivos com o HC-200.

#### Limpeza do canal do aparelho auditivo

- Introduza levemente o bico pontiagudo no canal do aparelho auditivo (como ilustrado) e inicie o processo de aspiração. Não introduza profundamente o bico no canal nem aplique qualquer força. Isso poderia danificar o seu aparelho auditivo (ilustração A).

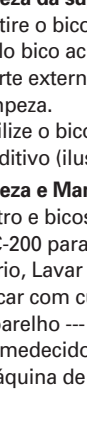

### Limpeza da superfície

- Retire o bico pontiagudo com o HC-200 desligado, substituindo-o pelo bico achatado como se vê na ilustração. Escova levemente a parte externa do seu aparelho auditivo com a pequena escova de limpeza.
- Utilize o bico achatado para aspirar a parte externa do seu aparelho auditivo (ilustração B).

#### Limpeza e Manutenção

- Filtro e bicos de aspiração --- Desaparafuse o bico de aspiração do HC-200 para retirar o filtro e eliminar qualquer humidade. Se necessário, Lavar o filtro e os bicos de aspiração com água corrente, secar com cuidado e instalar de novo (ilustração C).
- Aparelho --- Limpar o aparelho com um pano seco ou ligeiramente humedecido. Não utilizar solventes. Não lave o dispositivo numa máquina de lavar louça nem o mergulhe em água.

### Eliminação de resíduos

A eliminação adequada de resíduos de bens consumíveis é obrigatória por lei. O símbolo no seu dispositivo significa que os resíduos de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos terão de ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Os aparelhos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados no ponto de recolha da entidade gestora competente. Os resíduos de pilhas e acumuladores devem ser eliminados nos locais de venda e nos pontos de recolha responsáveis, que colocam à disposição recipientes próprios para esse fim. Os materiais de embalagem deverão ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

### Garantia


Os aparelhos AMPLICOMMS são fabricados e verificados de acordo com os mais modernos procedimentos de produção. A seleção de materiais e as tecnologias altamente desenvolvidas proporcionam um funcionamento perfeito e uma longa vida útil. O período de garantia é de 24 meses a partir da data de compra. A garantia não é aplicável às baterias, baterias recarregáveis ou aos pacotes de baterias recarregáveis. Durante o período de garantia, resolvemos de forma gratuita todos os defeitos atribuíveis a defeitos de material ou de fabrico. O direito de garantia extingue-se em caso de intervenções feitas pelo cliente ou por terceiros. A garantia não abrange qualquer dano causado por tratamento ou manuseamento indevidos, desgaste natural, instalação ou armazenamento inadequados, ligação ou instalação incorretas, bem

### Serviço Linha Verde

Se tiver problemas técnicos, entre em contacto conosco através do nosso serviço Linha Verde. O número de telefone está no nosso site [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com) Para reclamações de garantia, entre em contacto com a sua loja especializada. O período de garantia é de 2 anos.

**Audioline GmbH**  
**D-41460 Neuss**  
**02/2016 – V 1.0**

### Recycling symbols

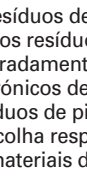

### Warranty

As peças ou os aparelhos substituídos ficam na posse da nossa empresa. Exclui-se qualquer direito a indemnização por danos e prejuízos, desde que estes não sejam devidos a intencionalidade ou negligência grave por parte do fabricante. Se, apesar disso, o seu aparelho apresentar algum defeito durante o período de garantia, pedimos-lhe que se dirija unicamente à loja onde adquiriu o seu aparelho AMPLICOMMS, munido do seu comprovativo de compra. Todos os direitos de garantia, de acordo com estas disposições, deverão ser exercidos unicamente junto da sua loja especializada. Decorridos dois anos desde a data de compra e entrega dos nossos produtos, os direitos de garantia não poderão ser exercidos.

### Barcode

