




TCL 210 Travel

Bruksanvisning

**Denna broschyr visar en
översikt över din
TCL 210 Travel.**

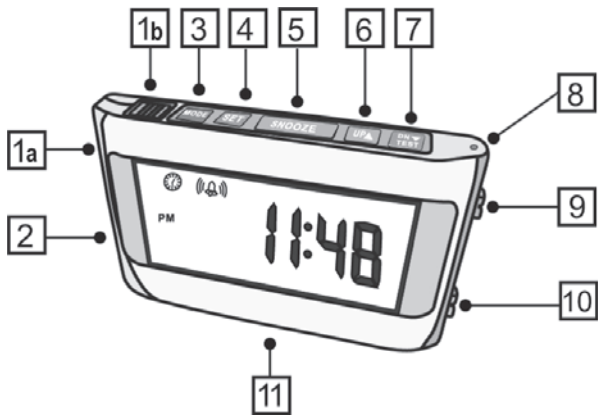

- 1a Ficklampa
- 1b Reglage för ficklampa
- 2 Alarmvalsreglage (väckningssignal + vibration, vibration, väckningssignal, Av)
- 3 LÄGES-knapp (väckningssignal, korttidsmätning, "äggklocka", temperatur)
- 4 SET-knapp för att bekräfta en inmatning
- 5 SNOOZE-knapp
- 6 UP ▲ para subir
- 7 DN ▼ /TEST-knapp
- 8 Öse för fästrem
- 9 Inställning väckningssignal (1-2-3 = under-mellan-över)
- 10 Väckningssignalsvolym (1-2-3 = tyst-mellan-hög)
- 11 Batterifack (baksida)

Innehåll


- Väckarklocka med vibrationsalarm
- 3 batterier, Typ AA (Mignon)
- Fästrem med clip (för att t.ex. fästa väckarklockan vid huvudkudden)
- Bruksanvisning

Sätt i batterierna

Sätt i de tre medskickade batterierna i batterifacket. Var noga med att polariteten kommer rätt.


Driftstiden hos ett nytt set med Alkalinebatterier är cirka 8 till 10 månader vid normal användning.

Inställning av tiden

1. Tryck på **SET**-knappen under cirka 2 sek.
 blinkar.
2. Ställ först in tim-format (24 eller 12 timmar / AM=förmiddag, PM=eftermiddag. **UP ▲** -knapp för inställning – **SET**-knapp för bekräftelse.
3. Ställ in timmar/minuter med **UP ▲** eller **DN ▼** och bekräfta allt med **SET**-knappen.

Inställning av väckningstid och snooze

Alarmvalsknappen får inte stå på **OFF**.

1. Tryck på **MODE**-knappen en gång för att ställa in väckning väckningstid.  blinkar. Tryck på **SET**-knappen i cirka 2 sek. som bekräftelse.
2. Ställ, med **UP ▲** eller **DN ▼** in timmarna/minuterna och bekräfta som alltid med **SET**-knappen.



Därefter blinkar **SNOZ**.

- Tryck nu på **SET**-knappen för att koppla in SNOOZE-funktionen.

Om du trycker **UP ▲** försvinner **SNOZ**. Om du nu trycker på **SET**-knappen är SNOOZE-funktionen urkopplad.


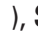
- Efter cirka 5 sekunder reverseras utrustningen tillbaka till att visa tiden och väckningstiden är lagrad.

Anvisning: Vid **påkopplad SNOOZE-funktion** (slummer-funktion) upprepas väckningssignalen igen efter cirka 8 minuter. Detta upprepas upp till 7 gånger. Om du **inte** trycker på någon knapp stängs väckningssignalen automatiskt av efter 40 sekunder för att sedan upprepas så som beskrivits ovan. Om du trycker på **SNOOZE-knappen** medan väck-

ningssignalen pågår stängs väckningssignalen slutgiltigt av.

Om **SNOOZE-funktionen** är urkopplad trycker man på valfri knapp för att stänga av den när väckningssignaler ljuder.

Inställning av väckaren och väckningsläge



1. Skjut alarmvalsreglaget till läget **OFF** för att stänga av väckningsfunktionen och den just nu ljudande väckningssignalen.
2. Skjut alarmreglaget till läget **AUDIO** (väckningsljud/ ), **SHAKER** (vibration/ ) eller **ALL** (väckningsljud + vibration) för att välja väckningsläge och sätta på väckaren.



Kontrollera väckningsinställningen

1. Tryck på **DN ▼** / **TEST**-knappen under cirka 3 sekunder. Den inställda väckningsfunktionen initieras i 10 sekunder. Därefter återgår apparaten tillbaka till normal tidsvisning.


Användning för korttidsmätning ("äggklocka")

1. Tryck på **MODE**-knappen två gånger för att starta korttidsmätningfunktionen (timmar/minuter).  blinkar. Tryck på **SET**-knappen i cirka 2 sekunder som bekräftelse.
2. Ställ in timmarna/minuterna med **UP ▲** eller **DN ▼** och bekräfta alltid med **SET**-knappen.
3. Tryck inom 5 sekunder **DN ▼** för att starta korttidsmätaren.  , **H** och **M** blinkar medan tiden löper.

Om **DN ▼** -knappen inte trycks in inom 5 sekunder, återgår apparaten tillbaka till normal tidsvisning.

Anvisning: Om den inställda tiden har löpt ut, ljuder väckningssignalen under 30 sekunder. Du kan stänga av den här signalen genom att trycka på valfri tangent. När du vill stoppa korttidsväckaren emellanåt trycker du på **DN ▼** . Sedan återgår apparaten automatiskt tillbaka till tidsvisning.

Visning av rumstemperaturen

1. Tryck på **MODE**-knappen 3 gånger för att sätta på temperaturvisning.  blinkar.
2. Växla om nödvändigt med **UP ▲** -knappen mellan visning i °C eller °F.



3. Efter ungefär 5 sekunder visas automatiskt tiden igen.

Tekniska data/funktioner

Funktioner: klocka, väckare, korttidsmätare ("äggklocka"), termometer och ficklampa

Tidvisning: 12 och 24 timmar

Väckningsmetod: Väckningssignal, vibration, väckningssignal & vibration

Temperaturvisning: °C och °F

Mått: 118 x 71 x 27 mm

Vikt (utan batterier): 140 g

Energiförsörjning: 3 AA Alkaline batterier

Batterilivslängd: 8-10 månader vid normalt bruk


Säkerhetsanvisningar

Asegúrese de leer esta guía con atención y guárdela por si la necesita más adelante.

Avfallshantering



Du är juridiskt ansvarig för korrekt utförd avfallshantering av förbrukningsartiklar. Symbolen på

 din apparat betyder att elektrisk- och elektroniskt skrotfärdigt material och batterier skall kastas skilda från hushållsavfallet. Elektrisk och elektronisk utrustning skall lämnas till kommunala uppsamlingsställen för återvinning. Batterier skall återlämnas till återförsäljare av dessa eller till befintliga uppsamlingsställen där särskilda behållare finns för ändamålet.

Detta är kostnadsfritt. Förpackningsmaterial kastas enligt lokala föreskrifter.



Anvisningar för vård av utrustningen

- Rengör höljet med en mjuk och luddfri trasa.
- Använd inga rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Garanti

AMPLICOMMS apparater har tillverkats och testats enligt modernaste förfaranden. Särskilt utvalt material och högt utvecklad teknik sörjer för felfri funktion och lång livslängd. Garantifall föreligger inte om orsaken till apparatens felaktiga funktion ligger hos mobilnätssleverantören. Garantin gäller inte för batterier eller batteri-

packar som används i produkten. Garantitiden löper i 24 månader räknat från inköpsdagen. Under garantiperioden ersätts alla defekter på material eller framställningsfel kostnadsfritt. Garantianspråket upphävs vid ingrepp av köparen eller tredje part.

Skador som uppstått pga ej avsedd användning eller behandling, naturligt slitage pga felaktigt bruk eller förvaring, pga ej fackmannamässiga anslutning eller installation, eller som orsakats av vårdslöshet eller annan yttre påverkan, gör garantin ogiltig. Vid reklamationer förbehåller vi oss rätten att reparera delar, att ersätta eller byta ut delar eller hela apparaten. Utbyta delar eller utbyta apparater övergår till vår egendom. Skadeståndsanspråk är uteslutna, såvida de inte grundar sig på grovt åsidosättande från oss. Skulle din appa-

rat ändå uppvisa defekter under garantiperioden vänder du dig, med ditt kvitto, till den butik där du har inhandlat din AMPLICOMMS-utrustning. Alla skadeståndsanspråk är, enligt dessa bestämmelser, uteslutande gentemot din återförsäljare. Efter ett förlopp av två år efter inköp och leverans av våra produkter upphör garantin att gälla.


Konformitetsförklaring

Denna utrustning uppfyller kraven
enligt EU-riktlinje:



2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet. Konformitet med ovan nämnda riktlinje bekräftas genom CE-märket på apparaten.

För att få tillgång till den fullständiga konformitetsförklaringen ombeds du ladda ner denna kostnadsfritt från vår hemsida, **www.amplicomms.com**

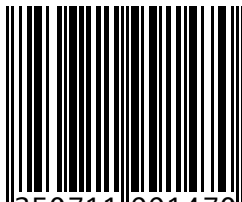

4 250711 991470



Firma: Audioline GmbH,
D-41460 Neuss
01/2013 – utgåva 1.1

