

PowerTel 880



**Gebruikers-
handleiding**

Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 880

Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 880

Draadloze handtelefoon/lader



De telefoon aansluiten	10
De inhoud van de doos controleren	10
Uw telefoonsysteem in vier eenvoudige stappen opzetten	11
Het snoertelefoontoestel aansluiten	11
Lader aansluiten	12
Plaats de batterijen	12
De draadloze handtelefoon opladen	13
De riemklem bevestigen	13
Uitleg over de scherpictogrammen op het	14
snoertelefoontoestel	14
Uitleg over de scherpictogrammen op de handtelefoon	15
Toelichting telefoonmenu	17
De menuschermen op uw telefoon gebruiken	17
Basisaanwijzingen	17
Bellen en telefoontjes ontvangen	20
Bellen met de snoertelefoon	20
Bellen met de draadloze handtelefoon	20
Een gesprek beëindigen	20
Een telefoongeprek voeren	21
Nummerherhaling op het snoertelefoontoestel	21
Een nummer opnieuw kiezen met de draadloze handtelefoon	22

Een voorgaande beller terugbellen	22
Een nummer uit het telefoonboek draaien	23
Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen	23
Het volume van het luidsprekertje instellen	24
Het volume van het luidsprekertje versterken	24
De toon instellen	24
De handenvrije functie	25
Gebruik de handenvrije functie om te bellen met de snoertelefoon	25
Gebruik de handenvrije functie om te bellen met de draadloze handtelefoon	25
De duur van het telefoongesprek aflezen	26
Een headset (niet meegeleverd) gebruiken	26
Dempen	26
De bel op de handtelefoon slechts in- en uitschakelen	26
Het toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen en ontgrendelen	27
Een intern telefoongesprek voeren	27
Een extern gesprek intern doorgeven	28
Telefonisch vergaderen met de snoertelefoon	29
Telefonisch vergaderen met de draadloze handtelefoon	29
Een draadloze handtelefoon zoeken	30
Wat te doen bij een stroomstoring	31
Het menu gebruiken - snoertelefoon	34
Gebruikersprofielen	34
De profielnaam veranderen	34

Het hoornvolume van een profiel veranderen	35
De boostinstelling van een profiel veranderen	36
De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen	36
Een profiel kopiëren	37
Kiezen welk profiel u wilt gebruiken	37
Beltoon veranderen	38
Eigen beltoon opnemen	39
Beltoonvolume veranderen	39
Versterking opslaan	40
De toetstoon in- of uitschakelen	41
Schermincontrast veranderen	41
Schermtaal veranderen	41
Nummer voorlezen	42
Tekencombinatie wijzigen	43
De PIN-code van het systeem veranderen	43
Datum / tijd veranderen	44
Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie	44
Terugstellen op de standaard instellingen	45
Het telefoonboek gebruiken - snoertelefoon	45
Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek	46
Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren	46
Een telefoonboekitem bewerken	47

Telefoonboekitems verwijderen	48
Telefoonboekitems naar een andere toestel kopiëren	48
De snelkieslijst gebruiken - snoertelefoon	50
De naam en het snelkiesnummer opslaan	50
Een snelkiesnummer bewerken	50
Een snelkiesnummer verwijderen	51
De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken - snoertelefoon	52
Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan	53
in het telefoonboek of de snelkieslijst	53
Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen	53
Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen	54
Het menu gebruiken - draadloze handtelefoon	56
Prioriteitsinstelling / standaardinstelling	56
Gebruikersprofielen	56
Een profielnaam veranderen	56
Het handtelefoonvolume van een profiel veranderen	57
De versterkerinstelling van een profiel veranderen	57
De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen	58
Een profiel kopiëren	58
Kiezen welk profiel u wilt gebruiken	59
De beltoon van de draadloze handtelefoon veranderen	60
Het beltoonvolume van de draadloze handtelefoon veranderen	60

De tooninstelling (equalizer) veranderen	61
Versterking opslaan	61
De naam van de draadloze handtelefoon veranderen	62
Het toetsgeluid in- of uitschakelen	62
Contrast veranderen	63
Autotalk in- of uitschakelen	63
Klok voor de achtergrondverlichting instellen	64
Bevestigingspiep in- of uitschakelen	64
Basis selecteren	65
Taal veranderen	65
Datum / tijd veranderen	66
Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie	66
Alarm instellen	67
De beltoon van de basis (snoertelefoon) veranderen	68
Het beltoonvolume veranderen (snoertelefoon)	68
Afspraken	69
Chronometer	70
Terugstellen op de standaard instellingen	71
Op de draadloze handtelefoon terugstellen naar de standaardinstellingen ..	71
Het telefoonboek gebruiken - draadloze handtelefoon	72
Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek	72
Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren	73

Een telefoonboekitem bewerken	73
Een item of alle items verwijderen	74
Telefoonboekitems naar een andere toestel kopiëren	74
De snelkiestoetsen gebruiken - draadloze handtelefoon	76
De naam en het snelkiesnummer opslaan	76
Een snelkiesnummer bewerken	76
Een snelkiesnummer verwijderen	77
De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken - draadloze handtelefoon ...	78
Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek	79
Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes in een snelkiestoets opslaan	79
Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen	80
Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen	80
Het antwoordapparaat gebruiken	82
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	82
Gesprek overnemen van antwoordapparaat	82
De taal voor het antwoordapparaat selecteren	83
Het luidspreekervolume van het basisstation instellen	83
De antwoordmethode instellen	83
Het bericht opnemen	84
Het bericht controleren	85

De antwoordvertraging instellen	85
Een memo opname	86
Met behulp van de knoppen op het snoertelefoon naar berichten of memo's luisteren	86
Een bericht of memo wissen	87
Alle oud berichten en memo's verwijderen	87
Met de handtelefoon naar berichten of memo's luisteren	87
Geheugen vol	88
Externe toegang tot het antwoordapparaat	88
De PIN-code veranderen	88
Inbellen om berichten te controleren	89
Instructies voor externe toegang	90
Een draadloze handtelefoon registreren / registratie opheffen	92
Een draadloze handtelefoon registreren	92
De registratie van een draadloze handtelefoon opheffen	93
Gebruik op een bedrijfscentrale	96
De herkiestijd instellen met behulp van de snoertelefoon	96
De herkiestijd instellen met de draadloze handtelefoon	96
Een kiespauze invoegen	97
Aanvullende diensten gebruiken	97
De kiesmethode instellen met de snoertelefoon	98
De kiesmethode instellen met de draadloze handtelefoon	98

Help en ondersteuning	100
Helpgids	100
Veiligheidsinformatie	106
Bedoeld gebruik	106
Plaats van de telefoon	106
Stroomtoevoer	107
Medische apparatuur	107
Oplaadbare batterijen	107
Compatibiliteit met gehoorapparaten	108
Afvalverwijdering	108
Technische details	109
Standaard instellingen	110
Draadloze handtelefoon	110
Onderhoud en garantie	111
Onderhoud	111
Garantie	111
Conformiteitverklaring	112

De telefoon aansluiten

De telefoon aansluiten

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 106 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

De inhoud van de doos controleren

Wanneer u een PowerTel 880 pack hebt gekocht, moet u ontvangen:

- 1 snoertelefoontoestel
- 1 draadloze handtelefoon
- 1 batterijdeksel
- 1 riemklem
- 1 stroomadapter
- basisstation met lader (voor draadloze handtelefoon)
- 1 telefoonkabel
- 3 oplaadbare AAA 1,2 V 750 mAh NiMH batterijen


Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters, telefoonlijn en batterijen die u bij uw PowerTel 880 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Uw telefoonsysteem in vier eenvoudige stappen opzetten


1 Het snoertelefoontoestel aansluiten

1. Steek de stroomadapter in de met  gemarkeerde contrastekker aan de onderzijde van het snoertelefoontoestel en het andere einde in een stopcontact. Schakel het toestel in.
2. Steek de telefoonkabel in de met  gemarkeerde contrastekker aan de onderzijde van het snoertelefoontoestel en het andere einde in een stopcontact.
3. Steek het ene einde van de hoornsnoer in de handtelefoon en het andere einde in de zijkant van het toestel.

Bus voor trilkus-
sen (PTV100)
dat als accessoire
leverbaar is

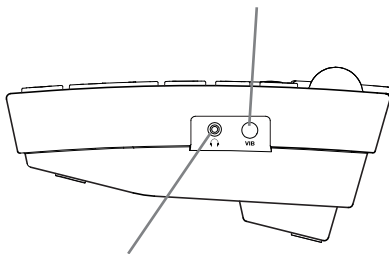


Bus voor headset
(niet meegele-
verd)

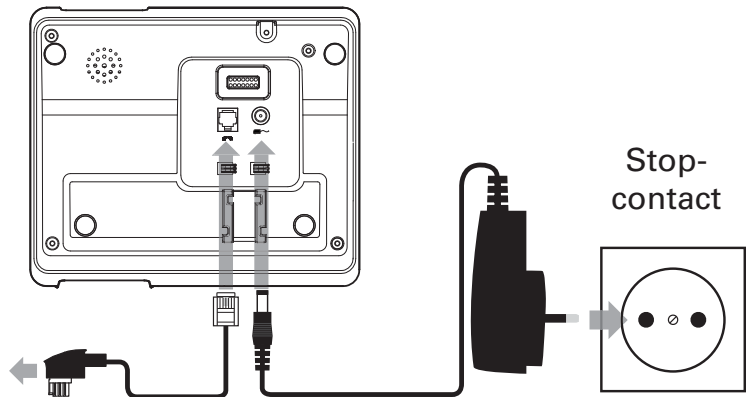

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapters, telefoonlijn en batterijen die u bij uw PowerTel 880 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.


2 Lader aansluiten

Steek de stroomadapter in het stopcontact.

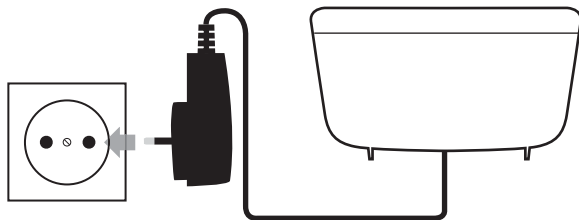

3 Plaats de batterijen

1. Plaats de oplaadbare batterijen in de draadloze handtelefoon. Zorg ervoor dat ze in de juiste richting wijzen, dus '+' bij '+'.
2. Plaats het dekseltje van het batterijvak van de draadloze handtelefoon weer.

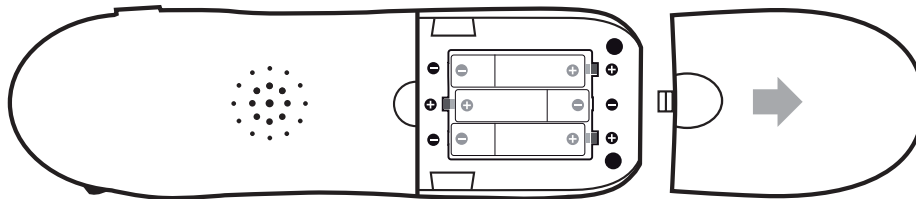

4 De draadloze handtelefoon opladen

Zorg dat de handtelefoon goed oplaadt: laat de handtelefoon minimaal 16 uur in het basisstation / lader zitten (controleer dat de wandcontactdoos stroom levert!).

Belangrijk: gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadbare 750mAh NiMH batterijen. Wanneer u na verloop van tijd de batterijen moet vervangen, schaf dan beslist hetzelfde type als de meegeleverde batterijen aan. Gebruik nooit Alkaline batterijen.

De riemklem bevestigen

In de doos vindt u ook een riemklem die u desgewenst aan de achterkant van uw draadloze telefoon kunt bevestigen. Leg de draadloze telefoon op de kop en haal de riem zorgvuldig door de twee openingen aan beide zijden van de telefoon.

Uw PowerTel 880 is nu klaar voor gebruik!

Eigen telefooncentrales: wanneer uw telefoon is aangesloten op een eigen telefooncentrale (wanneer u bijvoorbeeld een 9 moet draaien voor een buitenlijn), volg dan de stappen op pagina 96).

Uitleg over de scherpictogrammen op het snoertelefoontoestel

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van de handtelefoon om aan te geven:



Telefoonboekmodus



Bel uit



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolume ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van hoorn dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Intern telefoongesprek gaande

Uitleg over de scherpictogrammen op de handtelefoon

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van de handtelefoon om aan te geven:



Menu



Bevestigen / OK



Terug



Telefoonboekmodus



Links wordt meer informatie weergegeven



Rechts wordt meer informatie weergegeven



Batterijstatus



Bel uit



U hebt een alarm ingesteld



Toetsvergrendeling ingeschakeld



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolumen ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van draadloze handtelefoon dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Wanneer dit lampje brandt, bevindt de draadloze handtelefoon zich binnen het bereik van het basisstation

Wanneer dit lampje knippert, bevindt de handtelefoon zich buiten het bereik van het basisstation



Intern telefoongesprek gaande



Antwoordapparaat aan



Antwoordapparaat uit



Toelichting telefoonmenu



In dit gedeelte leert u de menuschermen op beide telefoons gebruiken.





De menuschermen op uw telefoon gebruiken



Wanneer u uw telefoons hebt ingesteld en alle aansluitingen zijn gemaakt, gebruik dan het menuscherm om met uw telefoons te werken, van telefoontjes plegen en ontvangen tot gebruikersprofielen opstellen en telefoonnummers opslaan.




Basisaanwijzingen

Open het hoofdmenu: druk op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).

Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op  of .



Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van  of  tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).

Blader naar een functie: open het submenu en druk op  of .

Een functie selecteren: blader met behulp van  of  tot de gewenste functie is gemarkeerd en druk dan op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).

Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.

Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).

Annuleren en terugkeren naar standby: druk op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).



Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 30 seconden automatisch op standby.

Bellen en telefoontjes ontvangen



Bellen en telefoontjes ontvangen

Bellen met de snoertelefoon


Ieder nummer dat u intoetst, wordt voorgelezen. Daartoe moet u echter wel de functie Nummer voorlezen aanzetten, zie pagina 42).

1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje.
2. Wanneer u een vergissing maakt, drukt u op  om het laatste cijfer te wissen.
3. U draait het nummer door de hoorn op te nemen of op  te drukken.
4. U beëindigt het gesprek door de hoorn weer op de haak te leggen.


Bellen met de draadloze handtelefoon

1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje.
2. Wanneer u een fout maakt, drukt u op  om de fout te wissen.
3. Draai het nummer door op  te drukken.
4. Met  beëindigt u het gesprek.

Een gesprek beëindigen

Wanneer u de snoertelefoon gebruikt, legt u de hoorn weer op de haak en wanneer u de draadloze handtelefoon gebruikt, drukt u op .

Een telefoongeprek voeren

Snoertelefoontoestel: Neem de hoorn op of druk op .

Draadloze handtelefoon: Neem de handtelefoon uit het basisstations (als “**Autotalk**” is ingeschakeld, zie pag. 63) en spreek in de telefoon. Wanneer de handtelefoon niet op het basisstation ligt (of als “**Autotalk**” uitgeschakeld is, zie pag. 63), drukt u op de knop  en spreekt u in de telefoon.

Nummerherhaling op het snoertelefoontoestel

Uw snoertelefoon slaat de laatste vijf nummers op die u hebt gedraaid (maximaal 24 cijfers per nummer).

1. Open de herkieslijst door op  te drukken.
2. Blader met de knoppen  of  door de herkieslijst tot het nummer dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd. U draait het nummer door gewoon de hoorn van de haak te nemen of in de handenvrije modus op  te drukken.

Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de herkieslijst bladert. Zie pagina 42, Nummer voorlezen, voor details.






Een nummer opnieuw kiezen met de draadloze handtelefoon

Uw handtelefoon slaat de laatste tien nummers op die u hebt gedraaid (maximaal 24 cijfers per nummer).

1. Open de herkieslijst door op  te drukken.
2. Blader met de knoppen  of  door de herkieslijst tot het nummer dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd en druk dan op  om het nummer te draaien.

Een voorgaande beller terugbellen

De telefoon slaat de laatste 30 inkomende telefoontjes op.



1. U opent de lijst van inkomende telefoontjes met de knoppen /R (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).
2. Blader met  of  naar het nummer dat u wilt terugbellen en neem de hoorn van de haak of druk op  op de draadloze handtelefoon.

Opmerking: wanneer u de functie Nummer voorlezen hebt ingeschakeld, leest het apparaat ieder nummer voor wanneer u door de lijst van inkomende telefoontjes bladert.




Zie pagina 42, Nummer voorlezen, voor details.

Een nummer uit het telefoonboek draaien

Wanneer u een nummer wilt opslaan in het telefoonboek, kijk dan op pagina 73 (snoertelefoon) of pagina 73 (draadloze handtelefoon).






1. U opent het telefoonboek met de knoppen  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon).
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden en neem de hoorn van de haak of druk op  op de draadloze handtelefoon.

of

voer de eerste letter in met behulp van de cijfertoetsen (bv. "m" voor "Muller"). Als er meerdere opties zijn die met een "m" beginnen, kiest u de juiste met  of  en neem de hoorn van de haak of druk op  op de draadloze handtelefoon.

Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen



Wanneer u een nummer wilt opslaan onder een snelkiestoets, kijk dan op pagina 50 (snoertelefoon) of pagina 76 (draadloze handtelefoon).


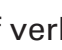
1. Bij de snoertelefoon kiest u het snelkiesnummer met ,  of  en bij de draadloze handtelefoon met ,  of .

2. Neem de hoorn van de haak of druk op  op de draadloze handtelefoon.



Opmerking: wanneer u de functie Nr. lezen hebt ingeschakeld en u drukt op een snelkiestoets, zal het apparaat het nummer voorlezen. Zie pagina 42, Nummer voorlezen, voor details.

Het volume van het luidsprekertje instellen



Snoertelefoontoestel: Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op  of .



Draadloze handtelefoon: Tijdens een gesprek kunt u het geluidsvolume met de beide knoppen aan de zijkant verhogen () of verlagen ()

Het volume van het luidsprekertje versterken

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op de toets  (snoertelefoon) of op de toets  linksboven op de draadloze handtelefoon. In het scherm knippert een oorpictogram om aan te geven dat de versterker aan staat.

De toon instellen

Wanneer u tijdens een telefoongesprek de toon wilt veranderen, drukt u op  en  of MEMO tot u de juiste toon hebt gevonden.

Druk gewoon tijdens een gesprek op de toetsen  of  op de draadloze handtelefoon.

Opmerking: het veranderen van de toon kan invloed hebben op het volume; misschien moet u bij een andere toon ook het volume aanpassen.





De handenvrije functie

Gebruik de handenvrije functie om een telefoongesprek te voeren zonder de hoorn vast te houden of om andere mensen in de kamer te mee te laten luisteren naar het telefoongesprek.

Gebruik de handenvrije functie om te bellen met de snoertelefoon

1. Met  schakelt u de handenvrije modus aan of uit.
2. Met  of  (5 niveaus) stelt u het volume voor handenvrij bellen in.

Gebruik de handenvrije functie om te bellen met de draadloze handtelefoon


1. Wanneer u  tweemaal indrukt, schakelt u de handenvrije modus in.
2. Met  verlaat u de handenvrije modus.
3. U stelt het volume in met de schakelaar aan de rechterzijde van de draadloze handtelefoon of met knoppen  of 

Tip: Bij handenvrij bellen is de versterker niet beschikbaar.

De duur van het telefoongesprek aflezen



Op het scherm kunt u de duur van het telefoongesprek lezen.

Een headset (niet meegeleverd) gebruiken

Steek de headset gewoon in de contactbus voor de headset (symbool ) aan de rechterzijde van de draadloze handtelefoon of de snoertelefoon. U kunt deze bus ook gebruiken met een inductie-neklus NL100 (niet meegeleverd).


Dempen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.

Met  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon) schakelt u de microfoon uit.




Wanneer u opnieuw op  (snoertelefoon) of  (draadloze handtelefoon) drukt, schakelt u de microfoon weer in.

De bel op de handtelefoon slechts in- en uitschakelen

Wanneer u  gewoon een aantal seconden ingedrukt houdt, schakelt u de bel in of uit.



Het toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen en ontgrendelen

Bij een vergrendeld toetsenpaneeltje kunt u nog steeds inkomende telefoontjes beantwoorden.


Wanneer u  3 seconden ingedrukt houdt, vergrendelt u het toetsenpaneeltje. Het scherm geeft het pictogram  weer. Om het toetsenbord te ontgrendelen, houdt u de knop  opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Een intern telefoongesprek voeren


Het snoertelefoonstelsel heeft een nummer **0** voor interne gesprekken en uw draadloze handtelefoon een nummer **1**. U kunt interne gesprekken voeren tussen de draadloze handtelefoon en de hoorn van de snoertelefoon. Voor deze gesprekken gelden geen tarieven.

1. Druk kort op de toets  **INT** op de draadloze handtelefoon of druk 3 seconden op de toets  op het snoertelefoon. In het scherm wordt **Intern** - (draadloze handtelefoon) of **Handset?** (snoertelefoon) weergegeven. Voer het interne nummer van de gewenste telefoon in, bv. 0 (voor het snoertelefoon) of 1 (voor de draadloze handtelefoon).
2. Om het gesprek aan te nemen met de gewenste telefoon, heft u de hoorn op

(snoertelefoon) of drukt u op  (draadloze handtelefoon).

3. U beëindigt het gesprek door de hoorn op de haak te leggen of op de draadloze handtelefoon  in te drukken.

Een extern gesprek intern doorgeven

1. Druk tijdens een gesprek met een externe partner op de draadloze handtelefoon op de knop  of op de knop . Als u met het snoertelefoon telefoneert, houd dan de toets  3 seconden ingedrukt tot u een korte pieptoon hoort.
2. Voer dan het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld 1 (om de draadloze handtelefoon te bellen) of 0 (om de snoertelefoon te bellen).
3. Om het gesprek aan te nemen met de gewenste telefoon, drukt u op de draadloze handtelefoon op de toets  of heft u de hoorn van het snoertelefoon op.
4. U kunt nu de interne gesprekspartner melden dat u een oproep doorschakelt naar hem/haar. Druk op  of leg de hoorn op om het gesprek door te schakelen.



Opmerking: wanneer niemand de telefoon opneemt, kunt u het telefoontje terugnemen met  of .

Telefonisch vergaderen met de snoertelefoon

U kunt op eenvoudige wijze een conferentiegesprek voeren met één externe en twee interne personen.

1. Houd bij een extern gesprek  ingedrukt tot u een scherpe pieptoon hoort.
Voer dan het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld **1** (om de draadloze handtelefoon 1 te bellen).
2. Met  neemt u op de draadloze handtelefoon het telefoontje aan.
3. Wanneer de persoon aan de andere kant van de lijn het telefoontje heeft aangenomen, activeert u het conferentiegesprek door  2 seconden ingedrukt te houden.
4. Met  kunt u het externe gesprek in de wacht zetten.
5. U beëindigt het conferentiegesprek door de hoorn weer op de haak te leggen.


Telefonisch vergaderen met de draadloze handtelefoon

1. Druk tijdens een gesprek met een externe partner op de knop  of op de knop . Voer dan het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld **0** (om de snoertelefoon te bellen).

2. Om de oproep aan te nemen met de gevraagde telefoon, heft u de hoorn van het snoertelefoon op.
3. Zodra de oproep wordt beantwoord met de geselecteerde telefoon, activeert u het conferentiegesprek door kort op de knop  te drukken en terug los te laten.
4. Met  beëindigt u het telefonisch vergaderen.

Een draadloze handtelefoon zoeken

U kunt een kwijtgeraakte draadloze draadtelefoon opzoeken of een gebruiker van een draadloze handtelefoon alarmeren door vanaf het snoertelefoon de telefoon te laten piepen.

1. Druk op  op het snoertelefoon. De draadloze handtelefoon(s) piept / piepen.
2. Druk op een willekeurige knop op de draadloze handtelefoon(s) om het piepen te stoppen.



Wat te doen bij een stroomstoring

Wanneer de stroom uitvalt, kunt u de snoertelefoon wel blijven gebruiken om te bellen en telefoontjes aan te nemen, hoewel het lampje voor inkomende telefoontjes niet brandt, de gegevens van de beller niet worden opgeslagen en het scherm uitsluitend oplicht wanneer u de hoorn van de haak neemt.

Tevens kunt u:

- nummers bekijken en kiezen met behulp van het telefoonboek of de toetsen **M1**, **M2** en **M3**
- naar buiten bellen met behulp **Recall** (Flash) en pauzeren
- het volume van het luidsprekertje in de hoorn instellen
- de microfoon dempen

Het menu gebruiken - snoertelefoon

Het menu gebruiken - snoertelefoon

Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 45.

Voor informatie over het antwoordapparaat gaat u naar pagina 82.

Gebruikersprofielen









U kunt drie verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 10 letters).

Prioriteitsinstelling / standaardinstelling




Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch opgeroepen wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.


Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.


De profielnaam veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of /R tot het gewenste profiel is geselecteerd

en druk op .





3. Blader met behulp van /P of /R tot **Naam** is geselecteerd en druk op .




4. Wis de huidige naam door op  te drukken.



5. Voer een nieuwe naam in (maximaal 10 letters) en druk op .

Het hoornvolume van een profiel veranderen




U kunt vijf volumeniveaus kiezen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van /P of /R **Profiel** is geselecteerd en druk op .

2. Blader met behulp van /P of /R tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .

3. Blader met behulp van /P of /R tot **Volume** is geselecteerd en druk op .

4. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 3).

5. Verander het instelling met behulp van /P of /R en druk op .

De boostinstelling van een profiel veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  **P** of  **R** **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot **Luider** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen Aan of Uit).
5. Verander het instelling met behulp van  **P** of  **R** en druk op .

De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  **P** of  **R** **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige tooninstelling.
5. Verander het instelling met behulp van  **P** of  **R** en druk op .

Opmerking: wanneer u klaar bent met het veranderen van profielinstellingen, drukt u op  om het toestel weer gebruiksgereed te maken.

Een profiel kopiëren

U kunt een profiel kopiëren op een andere aangemelde en compatibele Power-Tel-telefoon.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of /R tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  of /R tot **Kopie** is geselecteerd en druk op .
4. Blader met behulp van  of  of /R naar het toestel (bv. 1, 2, 3 of 4) waarop u het profiel wilt kopiëren, en druk op .
5. Op de draadloze handtelefoon waarop u het profiel hebt gekopieerd: Druk op  om het kopiëren te bevestigen, of op  op het kopiëren te annuleren.

Kiezen welk profiel u wilt gebruiken

U moet de hoorn gebruiken om een profiel te kiezen voor een telefoontje. Een profiel kunt u niet handenvrij kiezen.

Voordat u een inkomend telefoontje beantwoordt, drukt u op **M1**, **M2** of **M3**, afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer.

Wanneer u wilt bellen, houdt u voordat u het nummer draait **M1**, **M2** of **M3** ingedrukt, afhankelijk van het profiel dat u wilt gebruiken. Het scherm geeft uw keuze weer.

Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om onder dat profiel het nummer te draaien voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.













Beltoon veranderen

Voor externe oproepen kunt u kiezen uit 10 (+ max. 5 eigen) beltonen, voor interne uit 9 verschillende beltonen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Beltoon** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Extern** of **Intern** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Blader met behulp van  of /R tot de beltoon is geselecteerd die u wilt gebruiken en druk op .

Eigen beltoon opnemen





U kunt eigen beltonen opnemen en ze een naam geven. Deze verschijnen dan in de lijst van beltonen voor externe oproepen. U kunt 5 beltonen opnemen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Beltoon** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Toon opn.** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of /R tot **Nieuw opn.** is geselecteerd en druk op .
4. U kunt na de pieptoon een eigen beltoon opnemen.
5. Op de opname te beëindigen, drukt u op .
6. Voer de naam van de nieuwe beltoon in en druk op .

In het menu "Beltoonopname" kunt u de eigen beltonen een naam geven, en ook individuele of alle opnames wissen.


Beltoonvolume veranderen


U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en **Uit**.


1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Beltoon** is geselecteerd en druk op .


2. Blader met behulp van  /P of /R tot **Belvolume** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen (bijvoorbeeld **Belvolume 5**).
4. Verander het instelling met behulp van  /P of /R en druk op .














Versterking opslaan

Wanneer deze functie op "Aan" staat, is de versterker continu ingeschakeld. In het scherm verschijnt het symbool .








Tijdens een gesprek wordt de versterkertoets verlicht en verschijnt in het scherm het symbool .

Met de knop  kunt u de versterker voor het huidige gesprek uitschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw ingeschakeld.

Wanneer de versterker uitgeschakeld is, kunt u hem met de knop  inschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw uitgeschakeld. .










1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  /P of /R **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  /P of /R tot **Geh. boost** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Verander het instelling met behulp van  /P of /R en druk op .

De toetstoon in- of uitschakelen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Toetstoon** is geselecteerd en druk op .
2. U ziet de huidige instellingen.
3. Verander het instelling met behulp van  of /R en druk op .









Schermincontrast veranderen

U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Contrast** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Verander het instelling met behulp van  of /R en druk op .











Schermtaal veranderen

U kunt kiezen uit 6 talen voor de toestel: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  **Display** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Verander het instelling met behulp van  of  en druk op .

Nummer voorlezen

Wanneer deze functie is ingesteld op Aan: iedere keer wanneer u een nummer invoert of een snelkiestoets indrukt om te bellen, of wanneer u door het telefoonboek bladert, leest de telefoon de nummers uit de nummerherhalinglijst of lijst van inkomende telefoontjes (wanneer u bent geabonneerd op een nummerweergave-/nummerherkenningdienst) voor u op.














1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Nr. lezen** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Verander het instelling met behulp van  of  en druk op .


Tekencombinatie wijzigen

Kies een tekencombinatie (ABC = zonder umlaut / AÀÁÂÃÄÅ = met umlaut / ABΓ = Grieks / AБBГ = Cyrillisch). Deze tekencombinatie wordt dan gebruikt voor het invoeren van gegevens in het telefoonboek.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of  of  of **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of  of  tot **Hfdl.op/af** is geselecteerd en druk op .
3. De huidige instelling wordt gemarkeerd (bv. ► **ABC**).
4. Verander het instelling met behulp van  of  of  of  en druk op .

De PIN-code van het systeem veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of  of  of **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of  of  tot **Systeem PIN** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de oude PIN-code in en druk op .
4. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op .








5. Voer de nieuwe pincode nogmaals in en druk op .




Tip: Wanneer u de pincode verandert, noteert u best de pincode ergens, want sommige functies kunnen enkel worden uitgevoerd met opgave van de pincode. Het is niet mogelijk, de pincode terug te zetten naar de fabrieksinstelling.

Datum / tijd veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Dag & Tijd** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de dag, maand en jaar in en druk op .
4. Voer de uren in en druk op .

Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Alarm/Klok** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Tijdformaat** is geselecteerd en druk op .






- U ziet de huidige instellingen.
- Verander het instelling met behulp van  P of  R en druk op .

Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 98.

Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 96.

Terugstellen op de standaard instellingen

Tip: Wanneer u de standaardwaarden terug instelt, worden de gegevens in het telefoonboek, in de oproep- en herhalingslijst en alle berichten op het antwoordapparaat gewist.

- Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  P of  R **Reset** is geselecteerd en druk op .
- Voer de nieuwe pincode in en druk op . Het snoertelefoon wordt teruggezet naar de standaardinstellingen.

Het telefoonboek gebruiken - snoertelefoon

U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden, voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.








Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.
Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.


Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek

U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij vertegenwoordigt.





Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van namen en telefoonnummers.






- Druk op  voor een spatie.
- Druk op  of  voor bepaalde speciale tekens.
- Druk op  om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.
- Druk op  om te schakelen tussen hoofdletters (bv. ABC) en kleine letters (bv. abc).

Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren

1. Druk op .
2. Als het telefoonboek leeg is, wordt **Telefonb Leeg** weergegeven.

Als er gegevens zijn, dan wordt de eerste weergegeven.










Druk op , blader met behulp van  P of  R tot **Nieuwe** is geselecteerd en druk op .

3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
4. Voer het telefoonnummer in en druk op .
5. Blader met behulp van  P of  R om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .

Een telefoonboekitem bewerken

1. Druk op .
2. Blader met behulp van  P of  R om het item te vinden dat u wilt bewerken en druk op .
3. Blader met behulp van  P of  R tot **Bewerk** is geselecteerd en druk op .
4. Wis de tekens met , voer via het toetsenbord de nieuwe tekens in en druk op .
5. Wis de cijfers met , voer via het toetsenbord de nieuwe cijfers in en druk op .
6. Blader met behulp van  P of  R om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .

Telefoonboekitems verwijderen

1. Druk op .
2. Blader met behulp van /P of /R om het item te vinden dat u wilt verwijderen en druk op .
3. Blader met behulp van /P of /R tot **Wis Invoer** of **Wis Alles** is geselecteerd en druk op .
4. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.














Telefoonboekitems naar een andere toestel kopiëren

Opmerking: u kunt het telefoonboek uitsluitend naar een andere handset kopiëren wanneer deze handset is geregistreerd op het telefoonsysteem. Zie pagina 92.




Het kopiëren is eenvoudig:

- een enkel item (Kopiëren)
- items die nog niet op de draadloze handtelefoon staan waarheen u wilt kopiëren (Inhoud kop.)
- alle items (Kop. Alles)


Belangrijk: wanneer u alle items naar een handset kopieert, worden alle daar aanwezige items gewist.

1. Druk op .
2. Blader met behulp van   / **P** of  / **R** om het item te vinden en druk op .
3. Blader met behulp van   / **P** of  / **R** tot **Kopiëren, Inhoud kop.** of **Kop. Alles** is geselecteerd en druk op .
4. Selecteer met behulp van   of **MEMO** de draadloze handtelefoon waarheen u de nummers wilt kopiëren (bijvoorbeeld **HS2**) en druk op .
5. Neem de draadloze handtelefoon op waarheen u wilt kopiëren en druk op .

De snelkieslijst gebruiken - snoertelefoon



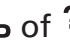

Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan:  ,  en  .

De naam en het snelkiesnummer opslaan










1. Druk op één van de snelkiestoets  ,  of  waaronder u de naam en het snelkiesnummer wilt opslaan.
2. Druk tweemaal op .
3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op .
4. Voer het telefoonnummer in en druk op .
5. Blader met behulp van  /  of  /  om een beltoon voor deze naam / dit nummer te kiezen en druk op .

Een snelkiesnummer bewerken

1. Druk op één van de snelkiestoets  ,  of  dat u wilt bewerken.
2. Druk op .
3. Blader met behulp van  /  of  /  tot **Bewerken** is geselecteerd en druk op .

4. Wis de tekens met , voer via het toetsenbord de nieuwe tekens in en druk op .
5. Wis de cijfers met , voer via het toetsenbord de nieuwe cijfers in en druk op .
6. Blader met behulp van  P of  R om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .


Een snelkiesnummer verwijderen




1. Druk op één van de snelkiestoets ,  of  dat u wilt verwijderen.
2. Druk op .
3. Blader met behulp van  P of  R tot **Wis Invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Op het scherm leest u **Wis invoer?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.



De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken - snoertelefoon










Tip: Deze functie staat enkel ter beschikking wanneer de netbeheerder de functie CLIP (weergave van telefoonnummer van de beller) heeft geactiveerd. Voor meer informatie raadpleegt u uw netbeheerder.

De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende  pictogram. Wanneer het nummer niet verschijnt, komt dat omdat degene die u belt zijn identificatie (ID voor nummerweergave) niet will vrijgeven.





Met /R kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen en bekijken. U kunt gewoon met /P of /R door de lijst bladeren.






Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst

U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het telefoonboek of de snelkieslijst M1, M2 und M3.








1. Druk op /R om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van P of /R om het item te vinden dat u wilt opslaan en druk op .
3. Blader met behulp van P of /R tot **Opsl. in TB**, **Opsl. in M1**, **Opsl. in M2** of **Opsl. in M3** is geselecteerd en druk op .
4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op .
5. Bewerk de nummer wanneer dat nodig mocht zijn en druk op .
6. Blader met behulp van P of /R om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op .

Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen

1. Druk op /R om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van P of /R om het item te vinden dat u wilt verwijderen en druk op .

3. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot **Wis Invoer** is geselecteerd en druk op .
4. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen

1. Druk op  **R** om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen en druk op .
2. Blader met behulp van  **P** of  **R** tot **Wis Alles** is geselecteerd en druk op .
4. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Het menu gebruiken - draadloze handtelefoon

Het menu gebruiken - draadloze handtelefoon

Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 72.

Voor informatie over het antwoordapparaat gaat u naar pagina 82.

Prioriteitsinstelling / standaardinstelling


Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch teruggestuurd wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.

Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.

Gebruikersprofielen

U kunt twee verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 11 letters).

Een profielnaam veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Naam** is geselecteerd en druk op .








4. Wis de huidige naam door op (A) te drukken.
5. Voer een nieuwe naam in (maximaal 11 letters) en druk op (B).

Het handtelefoonvolume van een profiel veranderen

U kunt vijf volumeniveaus kiezen.

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op (B).
3. Blader met behulp van  of  tot **Volume** is geselecteerd en druk op (B).
4. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 1).
5. Verander het volumeniveau met behulp van  of  en druk op (B).

De versterkerinstelling van een profiel veranderen

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op (B).
3. Blader met behulp van  of  tot **Luider** is geselecteerd en druk op (B).
4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen Aan of Uit).
5. Verander de versterkerinstelling met behulp van  of  en druk op (B).

De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige tooninstelling.
5. Verander de tooninstelling met behulp van  of  en druk op .

Opmerking: Druk op  om de draadloze handtelefoon gebruiksklaar te maken.

Een profiel kopiëren

U kunt een profiel op een eenvoudige manier kopiëren naar een geregistreerde compatibele PowerTel.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot het gewenste profiel is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Kopiëren** is geselecteerd en druk op .

4. Blader met behulp van $\langle \text{INT} \text{ bzw. } \text{R} \rangle$ tot het toestel (bijvoorbeeld **0** = snoer-telefoon) is geselecteerd en druk op **(B)**.
5. Op het toestel waarop u het profiel hebt gekopieerd: Druk op **(B)** (draadloze handtelefoon) of op **(≡)** (snoertelefoon) om het kopiëren te bevestigen, of druk op **(A)** (draadloze handtelefoon) of **(■)** (snoertelefoon) om het kopiëren te annuleren.

Kiezen welk profiel u wilt gebruiken

Als u voor een oproep bepaalde profielinstellingen wilt gebruiken, moet u de handtelefoon als hoorn gebruiken - bij handenvrij bellen is het niet mogelijk een profiel te activeren.

Wanneer een oproep binnenkomt, kiest u vóór u opneemt het gewenste profiel door meerdere malen op de knop "Profielinstelling" op de zijkant van de handtelefoon te drukken. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven in het scherm.

Wanneer een oproep binnenkomt, kiest u vóór u opneemt het gewenste profiel door meerdere malen op de knop "Profielinstelling" op de zijkant van de handtelefoon te drukken. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven in het scherm.

Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om het nummer te draaien voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.

De beltoon van de draadloze handtelefoon veranderen

U kunt kiezen uit tien beltonen.


1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op .
2. **Beltoon** is geselecteerd, druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Extern** of **Intern** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige beltooninstelling (bijvoorbeeld 7 [Extern], 9 [Intern]).
5. Verander de beltoon met behulp van  of  en druk op .




Het beltoonvolume van de draadloze handtelefoon veranderen

U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en Uit.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  tot **Volume beltoon** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 5).
4. Verander het belvolume met behulp van  of  en druk op .


De tooninstelling (equalizer) veranderen


1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot Handset is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet de instelling.
4. Verander de tooninstelling met behulp van  of  en druk op **(B)**.


Opmerking: wanneer u tijdens een telefoongesprek de tooninstelling wilt veranderen, drukt u op  om de equalizer in te stellen. Druk op de knop  of  om de instelling te veranderen. De staafgrafiek op het scherm van de draadloze handtelefoon toont de instelling. Druk op de volumeschakelaar aan de zijkant van de telefoon om deze stand te verlaten.

Versterking opslaan

Wanneer deze functie op "Aan" staat, is de versterker continu ingeschakeld. Het led-lampje op de linkerkant van de handtelefoon begint te branden bij een verbinding en op het scherm verschijnt "**Boost aan**".

Met de knop  kunt u de versterker voor het huidige gesprek uitschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw ingeschakeld.





Wanneer de versterker uitgeschakeld is, kunt u hem met de knop  inschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw uitgeschakeld.



1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Boost aan** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet de huidige opgeslagen instelling voor versterking (bijvoorbeeld Uit).
4. Verander de opgeslagen instelling voor de versterking met behulp van  of  en druk op **(B)**.

De naam van de draadloze handtelefoon veranderen

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Handset Naam** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. Wis de huidige naam door op **(A)** te drukken.
4. Voer een nieuwe naam in (maximaal 11 letters) en druk op **(B)**.



Het toetsgeluid in- of uitschakelen

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Toon toestenbord** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet de huidige instelling (dat wil zeggen Aan of Uit).


- Schakel de piep voor het toetsenpaneeltje aan of uit met behulp van  of  en druk op (B).





Contrast veranderen



U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm zodat u een prettig leesbaar scherm kunt instellen.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Contrast** is geselecteerd en druk op (B).
- U ziet de huidige contrastinstelling (bijvoorbeeld 3).
- Verander de contrastinstelling met behulp van  of  en druk op (B).

Autotalk in- of uitschakelen







Wanneer deze functie is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand wanneer u de draadloze handtelefoon van de basis pakt. Dat is de standaard instelling. Wanneer u deze instelling uitschakelt, moet u op de knop  drukken om een inkomend telefoontje te beantwoorden.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Autotalk** is geselecteerd en druk op (B).

3. U ziet de huidige autotalk-instelling (bijvoorbeeld Aan).
4. Verander de autotalk-instelling met behulp van  of  en druk op **(B)**.


Klok voor de achtergrondverlichting instellen



Voor de tijd dat de achtergrondverlichting blijft branden, kunt u kiezen uit 10, 20, 30 of 40 seconden.

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Tijd verlichting** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet de huidige tijdinstelling voor de achtergrondverlichting (bijvoorbeeld 10 s).
4. Verander de tijd van de achtergrondverlichting met behulp van  of  en druk op **(B)**.

Bevestigingspiep in- of uitschakelen




Dit is de piep die u hoort wanneer u een instelling verandert. U kunt de piep in- of uitschakelen.

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Toon bevestigen** is geselecteerd en druk op **(B)**.

3. U ziet de huidige instelling voor de bevestigingspiep (bijvoorbeeld Aan).
4. Verander de instelling van de bevestigingspiep met behulp van  of  en druk op (B).



Basis selecteren

Deze functie kunt u gebruiken wanneer uw draadloze handtelefoon bij meer dan één basis is geregistreerd.

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Selecteer basis** is geselecteerd en druk op (B).
3. U ziet de huidige instelling voor de basis (bijvoorbeeld Auto of Manueel).
Wanneer **Manueel** ingeschakeld is, kunt u een van de max. 4 basisstations kiezen waarop u de handtelefoon wilt gebruiken.
4. Verander de instelling van de basis met behulp van  of  en druk op (B).









Taal veranderen

Voor de draadloze handtelefoon kunt u kiezen uit 6 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.










1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).

2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige taalinstelling (bijvoorbeeld Nederlands).
4. Verander de taalinstelling met behulp van  of  en druk op .




Datum / tijd veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Datum en tijd** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de dag, maand en uren in (de draadloze handtelefoon heeft een 24-uurs notatie) en druk op .

Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Tijd formaat** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het tijdformaat (bijvoorbeeld 24 u).
4. Verander het tijdformaat met behulp van  of  om de 12 u of de 24 u notatie te selecteren en druk op .









Alarm instellen

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Alarm instellen** is geselecteerd (het alarm gebruikt een klok met een 24-uurs notatie) en druk op (B).
3. Kies **Een keer, Elke dag, Ma. tot Vrij.** en druk op (B).
4. Voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan en druk op (B).
5. Kies de alarmmelodie en druk op (B).

Druk op (A) om een alarm te bevestigen . Met (B) is de Snooze (slaap)-functie geactiveerd. Dit herhaalt het alarm tot vijf keer per 5 minuten. Dan is het uit.


De beltoon van de basis (snoertelefoon) veranderen

U kunt kiezen uit 9 beltonen voor de basis.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. **Beltoon** is geselecteerd, druk op .
3. U ziet de beltooninstelling (bijvoorbeeld 8).
4. Verander de beltoon met behulp van  of  en druk op .

Het beltoonvolume veranderen (snoertelefoon)





U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en Uit.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  tot **Beltoon volume** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet het huidige beltoonvolumeniveau voor de basis (bijvoorbeeld 5).
4. Verander het belvolume voor de basis met behulp van  of  en druk op .

Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 98.







Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 96.





De PIN-code van het systeem veranderen

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Systeem PIN** is geselecteerd en druk op (B).
3. Voer de oude PIN-code in en druk op (B).
4. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op (B).
5. Voer de nieuwe pincode nogmaals in en druk op (B).

Afspraken

U kunt tot vijf afspraken invoeren, zodat uw telefoon u eraan herinnert.





1. Open het menu door op de knop (A) te drukken, ga met  of  naar **Extra's** en druk op (B).
2. Ga met  of  naar **Afspraak** en druk op (B).
3. Ga met  of  naar **1, 2, 3, 4 of 5** en druk op (B).

4. Ga met  of  naar **Wijzigen** en druk op (B).
5. Wis de tekens met (A), voer via het toetsenbord een naam voor de afspraak in en druk op (B).
6. Voer via het toetsenbord de datum in en druk op (B).
7. Voer via het toetsenbord de tijd in en druk op (B).
8. Kies met  of  een melodie en druk op (B).

Om een afspraak te wijzigen of te wissen, selecteert u hem in het menu zoals hierboven beschreven en wijzigt u hem (menuoptie: Wijzigen) of wist u hem (menuoptie: Wissen).

Chronometer

De chronometer geeft de minuten en seconden weer.

1. Open het menu door op de knop (A) te drukken, ga met  of  naar **Extra's** en druk op (B).
2. Ga met  of  naar **Chronometer** en druk op (B).
3. Druk op (B) om de chronometer te starten.
4. Druk op (A) om de chronometer te stoppen.



Als u de chronometer hebt stilgezet, druk dan op [Start] om hem terug op te starten of druk op [Reset] om hem terug op nul te zetten.

Terugstellen op de standaard instellingen

Belangrijk: wanneer u de telefoon terugstelt op de beginwaarden, worden het telefoonboek, de lijst van inkomende telefoontjes en de herkieslijst gewist.

Op de draadloze handtelefoon terugstellen naar de standaardinstellingen

1. Houd **R** 10 seconden ingedrukt.
2. Druk op **(B)** om het terugstellen naar de standaardinstellingen te bevestigen of op **(A)** om te annuleren.



Het telefoonboek gebruiken - draadloze handtelefoon

U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden, voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.

Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.

Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.



Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek

U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij vertegenwoordigt. Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van telefoonnummers.



- Druk op **1** voor een spatie.
- Met **1** of **0** het leesteken of bijzondere teken invoeren
- Druk op **A** om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.
- Druk op ***** om te pendelen tussen hoofdletters (bijvoorbeeld ABC) en kleine letters (bijvoorbeeld abc)



Opmerking: wanneer u een letter tweemaal achter elkaar wilt invoeren, voert u gewoon de letter in en wacht u tot de cursor erachter verschijnt. Vervolgens voert u de letter nogmaals in.

Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren




1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Druk op **(B)**. Het scherm toont **Nieuwe Invoer**, druk nogmaals op **(B)**.
3. Voer de naam in en druk op **(B)**.
4. Voer het telefoonnummer in en druk op **(B)**.
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op **(B)**.

Een telefoonboekitem bewerken

1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt bewerken en druk op **(B)**.
3. Het scherm toont **Invoer wijzigen**, druk nogmaals op **(B)**.
4. Druk op **(A)** om tekens te wissen, voer nieuwe tekens in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op **(B)**.

5. Druk op (A) om cijfers te wissen, voer nieuwe in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op (B).
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor dit item te kiezen en druk op (B).

Een item of alle items verwijderen

1. Open het telefoonboek door op (B) te drukken.
2. Blader met behulp van  of  naar het item dat u wilt verwijderen of selecteer any item wanneer u ze allemaal wilt verwijderen en druk op (B).
3. Druk op  om of **Invoer wissen** of **Alles wissen** weer te geven en druk op (B).
4. Druk op (B) om het wissen te bevestigen of op (A) om te annuleren.

Telefoonboekitems naar een andere toestel kopiëren




Opmerking: u kunt het telefoonboek uitsluitend naar een andere toestel kopiëren wanneer deze toestel is geregistreerd op het telefoonsysteem. Zie pagina 92.

Het kopiëren is eenvoudig:

- een item (Kopieer invoer)
- items die nog niet op de draadloze handtelefoon staan waarheen u wilt kopiëren (Kopieer bijlage)

- alle items (Alles)



Belangrijk: wanneer u alle items naar een handset kopieert, worden alle daar aanwezige items gewist. U kunt dit vermijden door de methode Kopieer bijlage te gebruiken.

1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Blader met behulp van  of  om het item of de items te vinden dat / die u wilt verwijderen en druk op **(B)**.
3. Blader met behulp van  om één van de opdrachten **Kopieer invoer**, **Kopieer bijlage** of **Alles kopiëren** te selecteren en druk op **(B)**.
4. Blader met behulp van **<INT of R>** om het nummer van de draadloze handtelefoon te selecteren waarnaar u wilt kopiëren (bijvoorbeeld **0** voor snoertelefoon of **2** voor Handset 2) en druk op **(B)** om uw keuze te bevestigen.
5. Neem de draadloze handtelefoon op waarheen u wilt kopiëren en druk op **(B)**.

De snelkiestoetsen gebruiken - draadloze handtelefoon



Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan: ①, ② of ③.

De naam en het snelkiesnummer opslaan


1. Kies met één van de knoppen ①, ② of ③ de snelkiestoets waaronder u de naam en het snelkiesnummer wilt opslaan.
2. Druk op **(B)**. Het scherm toont **Nieuwe Invoer**, druk nogmaals op **(B)**.
3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op **(B)**.
4. Voer het telefoonnummer in en druk op **(B)**.
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op **(B)**. Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een snelkiesnummer bewerken

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk op één van de knoppen ①, ② of ③.
2. Druk op **(B)**. Het scherm toont **Invoer wijzigen**, druk nogmaals op **(B)**.
3. Druk op **(A)** om tekens te wissen, voer nieuwe tekens in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op **(B)**.
4. Druk op **(A)** om cijfers te wissen, voer nieuwe in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op **(B)**.


5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op **(B)**. Op het scherm leest u **Opgeslagen**.


Een snelkiesnummer verwijderen




1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk op één van de knoppen **(1)**, **(2)** of **(3)**.
2. Druk op **(B)**. Blader met behulp van  naar Invoer wissen en druk op **(B)**.
3. Op het scherm leest u **Invoer wissen?**. Druk op **(B)** om het wissen te bevestigen of op **(A)** om te annuleren.

De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken - draadloze handtelefoon

Opmerking: u moet eerst een abonnement nemen op de nummerweergave-/nummerherkenningdienst van uw netbeheerder. Misschien moet u een driemaandelijks bijdrage betalen. Voor meer informatie raadpleegt u uw netbeheerder.











De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende  pictogram. Wanneer een beller zijn telefoonnummer heeft verborgen of als het telefoonnummer om een andere reden niet wordt weergegeven, kan dit nummer niet worden opgenomen in de oproeplijst.

Met  kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen.

U kunt gewoon met  of  door de lijst bladeren. Met behulp van  kunt u meer informatie weergeven, inclusief datum en tijd van het gesprek.





Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek



U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het telefoonboek.

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt opslaan en druk op .
3. Het scherm toont **Sla nr. op**, druk op .
4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op .
5. Bewerk de naam wanneer dat nodig mocht zijn en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om de beltoon voor deze naam / dit nummer te kiezen en druk op .








Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes in een snelkiestoets opslaan

De nummers in de lijst van inkomende gesprekken kunnen direct worden opgeslagen in een snelkiestoets.







1. Druk op  om de lijst te openen bij de meest recente oproep.
2. Ga met  of  naar het gewenste nummer en druk op .

3. Ga met  naar **Bewaren in geh.1 / 2 / 3** en druk op .
4. De verdere stappen zijn dezelfde als die beschreven in "Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek".

Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het telefoontje te vinden dat u wilt verwijderen en druk op .
3. Druk op  om **Wis** te selecteren.
4. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen


1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen en druk op .
2. Druk op  om **Wis Alles** te selecteren en druk op .
3. Het scherm toont **Wis Alle Oprpn?**. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Het antwoordapparaat gebruiken

Het antwoordapparaat gebruiken

Na het opzetten van het telefoonsysteem kunt u met behulp van deze eenvoudige stappen het antwoordapparaat instellen op het snoertelefoon.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen



Voor het in- of uitschakelen van het antwoordapparaat, drukt u op het snoertelefoon gewoon op de knop . De huidige AB-modus wordt weergegeven.

Wanneer nieuwe berichten worden ingesproken, knippert het led-lampje op het snoertelefoon. Bovendien wordt in het scherm weergegeven hoeveel berichten zijn achtergelaten.

Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Als het antwoordapparaat al een oproep heeft beantwoord en u hoort het bericht van de beller, dan kunt u het gesprek overnemen.











Hef aan het snoertelefoon de hoorn op om met de beller te spreken.

Op de draadloze handtelefoon drukt u op  en vervolgens op  om het gesprek te overnemen.



De taal voor het antwoordapparaat selecteren

Voor het antwoordapparaat kunt u kiezen uit 6 talen:

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.



1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R **Beantw.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of /R tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instellingen.
4. Verander het instelling met behulp van  of  of /R en druk op .

Het luidsprekervolume van het basisstation instellen

U kunt het luidsprekervolume hoger of lager instellen met behulp van de knoppen   op het snoertelefoon.



De antwoordmethode instellen


Wanneer u het antwoordapparaat hebt ingeschakeld, kunt u kiezen tussen "**Beantw. + Opn**" (begroetingstekst 1) en "**Enkel Beant**" (begroetingstekst 2). Wanneer u de AB-modus instelt op "**Enkel Beant**", dan kan de beller geen bericht achterlaten.

1. Schakel het antwoordapparaat in met  op het snoertelefoon.
2. Om te schakelen tussen de standen **Beantw. +Opn** en **Enkel Beant** houdt u toets  enkele seconden ingedrukt.
3. Schakel het antwoordapparaat uit door op het snoertelefoon kort op de knop  te drukken.


Het bericht opnemen

U kunt het standaard antwoordbericht veranderen in een eigen bericht. Het bericht moet korter dan twee minuten zijn.

1. Houd  een aantal seconden ingedrukt en neem na de pieptoon uw bericht op.
2. Met  stopt u het opnemen. Uw boodschap wordt afgespeeld voor u.

Opmerking: wanneer u weer wilt terugkeren naar het standaard bericht, houdt u gewoon  ingedrukt terwijl u het bericht afluistert.

Het bericht controleren

1. Druk op  en uw bericht wordt voorgelezen.



De antwoordvertraging instellen

U kiest óf het aantal maal dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat het telefoontje beantwoordt (2-15 keer overgaan) óf Time Saver. Time Saver bespaart u de gesprekskosten wanneer u van elders belt om eventuele berichten af te luisteren: wanneer het antwoordapparaat antwoordt nadat de telefoon tweemaal is overgegaan, hebt u nieuwe berichten en wanneer het antwoordt nadat de telefoon vijfmaal is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten. Wanneer de telefoon drie keer is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten en kunt u dus ophangen om telefoonkosten te besparen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  of /R **Beantw.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  of /R tot **Vertr Antw.** is geselecteerd en druk op .
3. Verander het instelling met behulp van  of  of /R en druk op .

Een memo opneme





U kunt memoberichten voor uzelf of voor andere mensen uit het huishouden opnemen die kunnen worden afgespeeld als normale berichten.

1. Houd  een aantal seconden ingedrukt.
2. Na de pieptoon kunt u de memo opnemen.
3. Druk op  om het opnemen te stoppen.



Met behulp van de knoppen op het snoertelefoon naar berichten of memo's luisteren

Het afspelen gebeurt in omgekeerde volgorde als dat de berichten of memo's zijn opgenomen. Nieuwe berichten worden eerder afgespeeld dan oudere. Voorafgaand aan het afspelen van een bericht of memo worden opnamedatum en -tijd voorgelezen.



Hier zijn een paar functiens die handig kunnen zijn voor u:

- druk op  om af te spelen of te onderbreken
- druk op  om te stoppen
- druk op  om terug te spoelen
- druk op  om snel vooruit te spoelen

Een bericht of memo wissen

1. Speel het bericht of de memo die u wilt wissen af met behulp van .
2. Houd  een paar seconden ingedrukt tijdens het afspelen van het bericht of de memo om deze te wissen.

Alle oud berichten en memo's verwijderen

1. Houd  een aantal seconden ingedrukt wanneer er geen berichten worden afgespeeld.
2. Druk op  om uw keuze te bevestigen. De berichtenteller toont **dL** om aan te geven dat het wissen plaatsvindt.

Met de handtelefoon naar berichten of memo's luisteren

1. Wanneer u  indrukt, opent u het antwoordapparaat.
2. **Beantw.** verschijnt, druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Nieuwe b. afsp.** of **Alle b. afsp.** is geselecteerd en druk op .
4. Druk op  om terug te keren naar de bedrijfsgerede toestand.

Geheugen vol


Het antwoordapparaat geeft een bericht wanneer het vol is, neemt dan automatisch geen berichten meer op en schakelt over naar **Alleen antw.** U moet een paar berichten of memo's wissen voordat u nieuwe berichten kunt opnemen.

Externe toegang tot het antwoordapparaat

Wanneer u van huis bent, kunt u met de meeste moderne telefoons (inclusief mobiele telefoons) het antwoordapparaat bellen om de berichten te beluisteren. U moet een PIN-code gebruiken om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. De standaard code is 000. We adviseren u om veiligheidsredenen een andere code te kiezen.


De PIN-code veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R **Beantw.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **afstand PIN** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de oude PIN-code in en druk op .
4. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op .
5. Voer de nieuwe pincode nogmaals in en druk op .

U kunt op ieder moment op de toets  drukken wanneer u de modus voor het veranderen van de PINcode wilt verlaten en wilt terugkeren naar standby. De PIN-code blijft onveranderd.

Tip: Wanneer u de gewijzigde pincode voor afstandsbediening bent vergeten, kunt u met de reset-functie het toestel terugschakelen naar de fabrieksinstellingen (zie pagina 45). Daarbij worden alle instellingen gereset.

Inbellen om berichten te controleren

1. Draai vanaf de externe telefoon uw eigen telefoonnummer en wacht tot het antwoordapparaat het gesprek oppakt.
2. Druk twee keer op  en voer na de oproep uw driesijferige PIN-code in.
3. U kunt de berichten beheren met behulp van het toetsenpaneeltje (verder naar onderen vindt u de instructies voor afstandsbediening).

Opmerking: wanneer u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding en moet u opnieuw bellen om het weer te kunnen proberen.

Instructies voor externe toegang

Wanneer u onderweg naar de berichten thuis wilt luisteren, kunt u de berichten beheren met de volgende cijfers.

Om...

berichten terug te spoelen, drukt u op **1**.

berichten af te spelen of te onderbreken, drukt u op **2**.

snel door de berichten te spoelen, drukt u op **3**.

het bericht te horen (Outgoing Message = OGM), drukt u op **4**.

het bericht op te nemen (OGM), drukt u op **5**. U beëindigt het bericht met **6**.

berichten te stoppen, drukt u op **6**.

het huidige bericht te wissen, drukt u op **7**.

het antwoordapparaat uit te schakelen, drukt u op **8**.

het antwoordapparaat in te schakelen om berichten op te nemen, drukt u op **9**.

oude berichten te wissen, drukt u op **0**.

een memo op te nemen, drukt u op **#**. Om het bericht te beëindigen, drukt u op **6**.

**Een draadloze
handtelefoon
registreren / regis-
tratie opheffen**




Een draadloze handtelefoon registreren / registratie opheffen

Een draadloze handtelefoon registreren


U hoeft een draadloze handtelefoon uitsluitend te registreren wanneer het vanaf het basisstation is gederegistreerd of wanneer u een nieuwe draadloze handtelefoon los hebt gekocht. Er kunnen maximaal 5 handtelefoons worden gekoppeld aan een basisstation.

Belangrijk: zorg ervoor dat de draadloze handtelefoon die u wilt registreren volledig is opgeladen.

Op de draadloze handtelefoon:

1. Houd  circa 15 seconden ingedrukt tot het scherm toont **Hou Page op basis ingedrukt.**







Op snoertelefoon:

2. Houd  minstens 10 seconden ingedrukt tot in het scherm **Registreren** verschijnt.

De registratie van een draadloze handtelefoon opheffen

Wanneer u te veel draadloze handtelefoons op uw systeem hebt geregistreerd, of wanneer een handtelefoon een storing vertoont en moet worden vervangen, zult u de registratie van een handtelefoon willen opheffen.

Draadloze handtelefoon afmelden vanuit snoertelefoon

1. Open het menu door op  te drukken, blader met behulp van  of /R tot **HS verwijd.** is geselecteerd en druk op .
2. Voer de PIN-code in en druk op .
3. Voer het interne nummer van de handset in (bv. 2) en druk op .

Draadloze handtelefoon afmelden vanuit een draadloze handtelefoon

BELANGRIJK: U kunt enkel de andere handtelefoons afmelden, niet de handtelefoon die u voor dit proces gebruikt.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot Handset is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Registreer** is geselecteerd en druk op . Blader verder tot **Afmelden** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de PIN-code in (standaard PIN 0000) en druk op .
4. Voer het interne nummer van de draadloze handtelefoon in (bijvoorbeeld 1) en druk op  om uw keuze te bevestigen.



Gebruik op een bedrijfscentrale


Gebruik op een bedrijfscentrale




Wanneer uw telefoons zijn verbonden met een centrale (bijvoorbeeld wanneer u een 9 moet draaien om een buitenlijn te krijgen), kunt u telefoontjes doorzenden en tergubellen gebruiken met behulp van de R-knop. In de handleiding van de bedrijfscentrale leest u welke tijden u moet gebruiken voor gebruik op de centrale. U kunt kiezen uit twee herkiestijden: 100 ms (Kort) en 300 ms (Lang).

De herkiestijd instellen met behulp van de snoertelefoon

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of /R tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of /R tot **Recall** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige herkiesinstelling (bijvoorbeeld **Kort**).
4. Kies met behulp van  of /R de gewenste instelling voor de herkiestijd (**Kort** of **Lang**) en druk op .


De herkiestijd instellen met de draadloze handtelefoon

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Terugbellen** is geselecteerd en druk op .

3. U ziet de huidige herkie-instelling (bijvoorbeeld Kort).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste instelling voor de herkiestijd (Kort of Lang) en druk op .

Een kiespauze invoegen

Wanneer u een nummer voor een buitenlijn moet draaien en het duurt even voordat de verbinding plaatsvindt, kunt u een pauze invoegen zodat u niet hoeft te wachten om de kiestoon te horen.

Wanneer u op de draadloze handtelefoon een kiespauze wilt invoegen, voert u gewoon het nummer in dat u altijd draait voor een buitenlijn en drukt u vervolgens 2 seconden op . Een **P** op het scherm toont dat een kiespauze actief is.











Opmerking: u kunt ook een kiespauze invoegen bij een telefoonnummer in het telefoonboek.

Aanvullende diensten gebruiken





Uw telefoon moet diensten kunnen ondersteunen zoals wisselgesprek en telefonische vergadering. U moet contact opnemen met de netbeheerder voor meer informatie over deze diensten.

De kiesmethode instellen met de snoertelefoon

U kunt kiezen uit twee kiesmethoden: toon en puls. Tonen is de standaardinstelling en dit is de correcte instelling voor gebruik binnen Europa.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Instell.** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Kiesmode** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld **Tonen**).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste kiesmodus (**Tonen** of **Puls**) en druk op .

De kiesmethode instellen met de draadloze handtelefoon

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Trilalarm** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld **Tonen**).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste kiesmodus (**Tonen** of **Puls**) en druk op .

Help en ondersteuning

Help en ondersteuning

Sommige problemen kunt u eenvoudig oplossen door de stroomtoevoer te verbreken. In dergelijke gevallen moet u de stroomtoevoer naar het basisstation (snoertelefoon) 20 minuten uitschakelen en de batterijen uit de draadloze handtelefoon even lang verwijderd laten. Vervolgens herstelt u de stroomtoevoer weer en plaatst u de batterijen terug.

Helpgids

Ik kan niet bellen

1. Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dat zo is, kan er een storing zijn. Controleer of u de meegeleverde telefoonkabel gebruikt.
2. Controleer dat alle voedingen zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en werken.
3. Controleer dat u zich niet te ver van het basisstation / de lader bevindt (in ideale omstandigheden moet het tot 300 meter buiten werken en tot 50 meter binnen).
4. Test de telefoonlijn en het telefoonstopcontact met een andere telefoon.

Ik verlies steeds de verbinding, wanneer ik vanuit een draadloze handtelefoon telefoneer.

1. Controleer dan dat u zich niet te ver van het basisstation (snoertelefoon) bevindt (in ideale omstandigheden moet het tot 300 meter buiten werken en tot 50 meter binnen).
2. Misschien bevindt de basis (snoertelefoon) zich niet op de ideale plaats, overweeg haar te verplaatsen.

Ik hoor op regelmatige intervallen een korte dubbele beltoon in mijn draadloze handtelefoon.

1. Controleer of de batterijen geladen zijn.
2. Het kan zijn dat er interferentie door een ander elektronisch apparaat bestaat. Controleer of het snoertelefoon en de draadloze handtelefoon zich op voldoende afstand van andere elektronische apparaten bevinden. Kies indien nodig een andere plek.

Mijn handtelefoon schakelt steeds uit.

1. Misschien moet u het opnieuw laden. Zorg dat de draadloze handtelefoon goed oplaadt: laat de handtelefoon minimaal 16 uur in het basisstation / lader zitten (controleer dat de wandcontactdoos stroom levert!).
2. Vervang de oplaadbare batterijen. Vervangende batterijen moeten van hetzelfde type zijn als de meegeleverde batterijen.

Wanneer ik bij het bellen van een automatische service (hotline/telefonisch bankieren) wordt gevraagd om een cijfer in te voeren, lukt dit niet.

Het kan zijn dat het kiesproces ingesteld staat op "Puls" in plaats van op "Toon". Controleer de instelling, zie pagina 98.

Het telefoonsysteem reageert niet

Misschien moet u het terugstellen op de standaardinstellingen. Zie pagina 45 (snoertelefoon) of pagina 71 (draadloze handtelefoon).

Nummerweergave (identificatie van de beller) werkt niet.

1. Controleer dat uw netbeheerder deze dienst biedt. Bel uw netbeheerder.
2. De beller heeft misschien een geheim nummer.

Mijn draadloze handtelefoon of het snoertelefoontoestel gaat niet over.

Controleer of de bel is ingeschakeld. Zie de pagina's 26, 60 en 68.

Ik krijg een zoemend geluid op mijn radio, tv of computer.

We adviseren u met de draadloze handtelefoon minimaal een meter afstand te houden tot elektrische apparatuur en mobiele telefoons.

U gebruikt de telefoon en er treedt interferentie op in het ,luidsprekertje en / of de internetverbinding is erg langzaam

Wanneer u breedbandinternet op de telefoonlijn hebt, moet u een ADSL-filter tussen de telefoon en het wandstopcontact plaatsen.


Mijn antwoordapparaat wil geen berichten of memo's opnemen.

1. Controleer of het antwoordapparaat is aangesloten en ingeschakeld.
2. Het geheugen van het antwoordapparaat kan vol zijn. Zie pagina 88.

Mijn externe toegang werkt niet.

1. Controleer of u de juiste PIN-code gebruikt. Zie pagina 88.
2. Controleer dat u een toetstelefoon gebruikt.

Het witte lampje op de snoertelefoon knippert constant.

U hebt (een) nieuwe bericht(en) op het antwoordapparaat. Druk op  om ze te beluisteren; dan stopt het knipperen.



- 1. Een beller heeft me laten weten dat hij/zij een bericht op mijn antwoordapparaat heeft achtergelaten, maar er is geen bericht geregistreerd.**
- 2. Een beller heeft me laten weten dat hij/zij het bericht "Mailbox vol" (of gelijksoortig) te horen kreeg.**

Controleer of het antwoordapparaat bij uw netbeheerder is geactiveerd, en vraag de beheerder het te deactiveren.

Algemene informatie

Veiligheidsinformatie

Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Bedoeld gebruik

Deze analoge telefoon is bedoeld voor aansluiting op een openbaar telefoonnetwerk of een goedgekeurd privé-telefoonsysteem. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel niet en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Plaats van de telefoon

Zorg dat de telefoon:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- niet wordt gehinderd door meubels
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 880 is geleverd.

Een stroomstoring kan de telefoon en de apparatuur beïnvloeden. Bij stroomuitval kunt u deze telefoon niet gebruiken om te bellen. U moet speciale voorzieningen treffen voor toegang tot nooddiensten.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medische apparatuur

Gebruik de telefoon:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.

Oplaadbare batterijen

Gooi de batterijen niet in het vuur of in het water.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.

Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de draadloze handtelefoon gebruiken.

Afvalverwijdering

Wanneer u het apparaat wilt afvoeren, brengt u het naar een verzamel punt van uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf (bv. een containerpark). Krachtens de wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van afgedankte apparaten wettelijk verplicht oude elektrische en elektronische apparaten apart af te voeren. Het symbool hiernaast betekent dat het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag worden geworpen!



Gevaar voor de gezondheid en voor het milieu door accu's en batterijen!

Accu's en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in het milieu introduceren. Ze kunnen giftige en milieuschadelijke zware metalen bevatten.



U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen op een veilige manier af te voeren via een handelaar die batterijen verkoopt of via een inzamelpunt voor batterijen, waar geschikte containers ter beschikking staan. Het afvoeren gebeurt kosteloos. De symbolen hiernaast beteke-



nen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag werpen en dat u ze naar een geschikt inzamelpunt moet brengen. De **verpakkingsmaterialen** moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Technische details

Standaard	DECT ¹ GAP ²
Stroomtoevoer (basisstation)	Toevoer: 100-240V 50/60Hz Uitvoer: 6VDC 800mA
Bereik	Buiten circa 300 m Binnen circa 50 m
Standby	Maximaal 100 uur
Maximale gespreksduur	Maximaal 10 uur
Maximaal volume hoorn	+40dB (vervorming < 1,5 %)
Oplaadbare batterijen	AAA 1,2V 750mAh NiMH
Kiesmodus	Toon (DTMF) / Puls
Flash tijd (Terugbellen)	Kort (100 ms) / Lang (300 ms)
Optimale omgevingstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Optimale relatieve vochtigheid	20% tot 80%
Herkiezen	100, 300 ms

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standaard voor draadloze telefoons.

² GAP: Generic Access Profile = norm voor het gebruik van draadloze handtelefoons en basisstations van verschillende producenten.

Standaard instellingen

Voor het terugstellen naar de standaardinstellingen raadpleegt u pagina 71.

Draadloze handtelefoon

Taal	Nederlands
Naam	POWERTEL
Beltoon (extern / intern)	7 / 9
Beltoonvolume	5
Pieptoon toetsenpaneeltje	Aan
Autotalk	Aan
Contrast	3
Achtergrondverlichting	10 s
Versterkergeheugen	Uit
Herkiestijd (Terugbellen)	Kort (100 ms)
Kiesmodus	Toon
PIN-code	0000

Snoertelefoon

Taal	Nederlands
Antwoordmodus	Antwoorden en opnemen
PIN-code voor externe toegang	000
Antwoordvertraging	3
Tijdformaat	24-uurs
Beltoon (extern / intern)	8 / 9
Beltoonvolume	5
Pieptoon toetsenpaneeltje	Aan
Contrast	4

Versterkergeheugen
Herkiestijd (Terugbellen)
Kiesmodus

Uit
Kort (100 ms)
Toon

Onderhoud en garantie

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOMMS-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring



Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatie-zendingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website

www.amplicomms.com halen.

Index

A

Aansluiten	10
Aanvullende diensten	97
Achtergrondverlichting	64
Afspraken	69
Afvalverwijdering	108
Alarm	67
Alle oud berichten en memo's verwijderen	87
Antwoordapparaat in- of uitschakelen	82
Antwoordmethode	83
Antwoordvertraging	85
Autotalk	63

B

Basis selecteren	65
Basisaanwijzingen	17
Bedoeld gebruik	106
Bedrijfscentrale	96
Bel op de handtelefoon	26
Bellen	20
Beltoon	38, 39, 60, 68
Beltoonvolume	60, 68
Bericht of memo wissen	87
Bericht opnemen	84

Berichten of memo's luisteren	86, 87
Bevestigingspiep	64

C

Chronometer	70
Conformiteitverklaring	112
Contrast	63

D

Datum / tijd	44, 66
De registratie van een draadloze handtelefoon opheffen	93
De toon instellen	24
Dempen	26
Doorgeven	28
Duur van het telefoongesprek	26

E

Een draadloze handtelefoon registreren	92
Eigen beltoon	39
Equalizer	36, 61
Externe toegang tot het antwoordapparaat	88

G

Garantie	111
Gebruikersprofielen	34, 56

Geheugen vol	88
Gehoorapparaten	108
Gesprek beëindigen	20

H

Handenvrije functie	25
Handtelefoon opladen	13
Handtelefoon zoeken	30
Handtelefoonvolume	57
Headset	26
Helpgids	100
Herkiestijd	96
Hoornvolume	35

I

Inbellen om berichten te controleren	89
Inhoud van de doos	10
Instructies voor externe toegang	90
Intern telefoongesprek	27

K

Kiesmethode	98
Kiespauze	97

L

Lader aansluiten	12
------------------------	----

Lijst van inkomende telefoontjes	52, 78
Luidsprekervolume van het basisstation ..	83

M

Medische apparatuur	107
Memo	86
Menuschermen	17

N

Naam	62
Nummer voorlezen	42
Nummerherhaling	21

O

Onderhoud	111
Oplaadbare batterijen	107

P

Pictogrammen	14
PIN	43, 69
PIN-code veranderen	88
Plaats de batterijen	12
Plaats van de telefoon	106
Profiel	34, 56

R

Riemklem	13
----------------	----

S

Schermincontrast	41
Schermpictogrammen	14
Schermtaal	41
Snelkies	23, 50, 76, 79
Snoertelefoontoestel aansluiten	11
Standaard instellingen	45, 71, 110
Stroomstoring	31
Stroomtoevoer	107
Systeem PIN	43, 69

T

Taal	65
Taal voor het antwoordapparaat	83
Technische details	109
Tekencombinatie wijzigen	43
Telefonisch vergaderen	29
Telefoonboek	23, 45, 72
Telefoongeprek voeren	21
Telefoonmenu	17
Terugbellen	22
Terugstellen	71
Tijd formaat	66

Toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen	27
Toetsgeluid	62
Toetstoon	41
Tooninstelling	58, 61

V

Veiligheidsinformatie	106
Versterkerinstelling	57
Versterking	40, 61
Volume van het luidsprekertje	24



Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland
11.11 – ISSUE 1.0

