



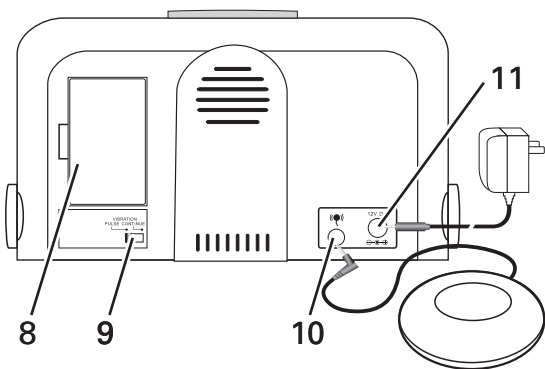

TCL 300

Manual de instruções

**Aqui encontrará todas as instruções de
controlo do seu Despertador
TCL 300.**

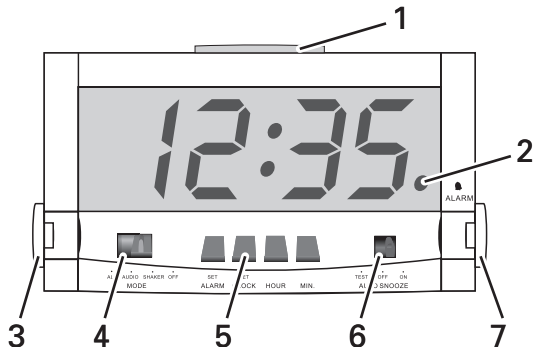

- 1 Tecla de ALARM STOP
- 2 Indicador "Alarme configurado"
- 3 Ajuste volume toque do despertador
- 4 Interruptor seleção de alarme (Toque despertador + vibração, vibração, toque despertador, desligado)
- 5 Teclas de ajuste para hora e alarme
- 6 Ajuste função de repetição de alarme
- 7 Ajuste som do toque do despertador
- 8 Compartimento bateria (bateria de prevenção)
- 9 Ajuste função de vibração
- 10 Conexão para vibrador de almofada
- 11 Entrada de alimentação

Conteúdo

- Despertador
- Fonte de alimentação 12 V, 800 mA
- Alarme vibrador
- Manual de instruções



Antes do uso

Cuidado: Use somente a fonte de alimentação incluída, porque outras fontes de alimentação podem danificar o aparelho. Não bloqueie o acesso à fonte de alimentação com mobiliário ou outros objetos.

Certifique-se que liga o cabo de conexão do vibrador do travesseiro de forma que ele passe sob o colchão/travesseiro e não seja visível ou acessível para evitar perigos.

Bateria de reserva

Para superar a falta de energia ou uma desconexão da fonte de alimentação, pode usar uma bateria de prevenção (9V). Assim, a hora e as configurações de alarme permanecem inalterados.

Durante uma falha de energia a hora não aparece e o

vibrador não vibra. Apenas toca o alarme. Se você apenas ativou a vibração (Shaker), apenas a tecla ALARME STOP irá aparecer.

Se você não usar uma bateria a configuração de hora e alarme será perdida. Consequentemente, se houver um corte de energia durante a noite, na manhã seguinte não será despertado na hora desejada.

Para facilitar a abertura da tampa da bateria, por favor, use um objeto pontiagudo como a ponta de uma caneta ou uma pequena chave de fendas.



Observe a polaridade correta ao conectar a bateria.

Comprove o estado da bateria depois de um ano aproximadamente e substitua-a se necessário. Baterias descarregadas podem danificar o aparelho.



Ajuste da hora

1. Mantenha premida a tecla **SET CLOCK**.
2. Utilize **HOUR** para programar horas e **MIN** para minutos.
3. Solte a tecla **SET CLOCK**.

Ajuste da hora do despertador

1. Mantenha premida a tecla **SET ALARM**.
2. Utilize **HOUR** para programar horas e **MIN** para minutos.
3. Solte a tecla **SET ALARM**.

Ajuste do despertador

1. Deslize o interruptor de seleção de alarme na posição **OFF** para apagar o alarme ou simplesmente desactivar o sinal de alarme que acaba de ouvir.
2. Deslize o interruptor de seleção de alarme á posição **AUDIO** (toque de despertador), **SHAKER** (vibração)



ou **ALL** (toque de despertador + vibração) para selecionar/ativar modo do despertador.

Nota: Nas posições **ALL**, **AUDIO** y **SHAKER** aparece a mensagem "alarme programado". A Mensagem fica intermitente quando se ativa o alarme.

Ajuste do modo de vibração

1. Selecione com o interruptor **VIBRATION**

- **PULSE:** Vibração descontinua
- **CONTINUE:** Vibração continua.

Ajuste da função de repetição de alarme

1. Selecione com o interruptor **SNOOZE**

- **OFF:** Desliga a função de repetição de alarme
- **ON:** Depois de pulsar a tecla **ALARM STOP** o sinal de alarme repete após cada 9 minutos.



Ajuste de volume

1. Use a tecla **VOL** para configurar o volume do som do despertador.

Ajuste do som

1. Use a tecla **TONE** para configurar o som do despertador.

Especificações

Funções: Relógio, despertador

Modos de alarme: Som de despertador, vibração, som de despertador + vibração.

Fornecimento de corrente: Fonte de alimentação com entrada 100 ~ 240 V AC, saída 12 V DC / 800 mA.

Bateria de prevenção (opcional): Troque a bateria 9 V anualmente.

Notas de segurança

Leia este guia com atenção e guarde-o, pode precisar dele no futuro.

Riscos elétricos

- Proteja o aparelho de gotas ou salpicos. Não coloque recipientes com líquidos, tais como vasos, sobre ou perto do aparelho. O recipiente pode-se virar e afetar a segurança elétrica.
- Não utilize dispositivos ou fontes de alimentação ao ar livre ou em áreas com muita humidade.
- Ligue apenas a uma tomada elétrica corretamente instalado cuja tensão corresponda à tensão indicada na fonte de alimentação.
- Desligue / desconecte a fonte de alimentação da tomada:
 - em caso de tormenta.



- antes de limpar o dispositivo.
- se surgem avarias durante o funcionamento.
- se não vai utilizar o dispositivo durante muito tempo.
- Não abra nem tire nenhuma parte da carcaça. Dentro da carcaça há peças sob tensão elétrica, cujo contacto pode causar uma descarga elétrica.
- Não introduza nenhum objeto nas aberturas. Pode tocar em peças sob tensão elétrica.
- O cabo de alimentação não deve dobrar-se nem torcer-se. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes ou de bordos afiados/cortantes.
- Comprove com regularidade se existem danos no dispositivo e na fonte de alimentação. No utilize o aparelho nem nenhum dos seus componentes, por exemplo fontes de alimentação ou cabos de alimentação, que apresentem danos visíveis ou que tenham caído.

Eliminação

Se quiser desfazer-se do aparelho, leve-o aos pontos de recolha autorizados pelas respectivas autoridades locais. De acordo com a Lei de aparelhos elétricos e eletrónicos, os proprietários de equipamentos são obrigados por lei a depositar equipamentos elétricos e eletrônicos de idade, num ponto de recolha separado. Este símbolo significa que não deve depositar este aparelho junto com lixo doméstico. Siga os regulamentos locais para o depósito do material da embalagem.



Instruções de manutenção

- Limpe as superfícies do aparelho com um pano suave e sem pêlos.
- Não utilize detergentes ou dissolventes.

Garantia

Os dispositivos AMPLICOMMS são fabricados e testados de acordo com os mais recentes métodos de produção. Materiais selecionados e uso de tecnologias avançadas garantem o perfeito funcionamento e uma vida longa.

A garantia não se aplica a baterias ou pilhas usadas no produto. O período de garantia é de 24 meses a partir da data da compra. Dentro do período de garantia todos os defeitos de material ou de fábrica serão resolvidos de forma gratuita. A garantia será anulada se o comprador ou terceiros manipularem inadequadamente o dispositivo. A garantia não se aplica em caso de danos causados pelo manuseio inadequado do aparelho, à conexão de rede e instalação, desgaste normal, à manutenção inadequada e armazenamento do dispositivo ou causas de força maior ou influências externas .

Em caso de reclamação , nos reservamos o direito de reparar peças com defeito , substituí-los ou substituir o dispositivo . As Peças ou o dispositivo substituído se tornará nossa propriedade. Reclamações são excluídos quando for comprovada pelo fabricante intencionalidade ou negligência grave.

Se, dentro do período de garantia , o aparelho ainda apresentar algum defeito , contacte a loja onde comprou o dispositivo AMPLICOMMS apresentando o recibo compra . Todos os pedidos de garantia sob estas disposições só serão válidos perante um distribuidor oficial do produto . As reivindicações de garantia cessam 2 anos após a data do recibo de compra.

Assistência telefónica

Em caso de problemas técnicos, por favor, entre em contato com nossa central de atendimento. Você vai

encontrar o número de telefone em nosso site

www.amplicomms.com

Para reclamações de reparação e garantia entre em contato com o seu distribuidor autorizado. O período de garantia é de 2 anos.

Declaração de conformidade

Este dispositivo está em conformidade
com os requisitos da Diretiva da UE:



2004/108/CE relativa à compatibilidade eletromagnética.

A conformidade com a diretiva acima mencionada é confirmado pelo símbolo CE no dispositivo.

Para a declaração completa de conformidade utilize
Download gratuito no nosso site:

www.amplicomms.com.



4 250711 992255



Audioline GmbH

D-41460 Neuss

03/2014 – Version 1.0

