



---

NL 100



Manual de instrucciones

**NL 100**



## NL 100

Manual de instrucciones .....	3
-------------------------------	---

## Información de seguridad

Por favor lea detenidamente este manual de instrucciones. No abra bajo ningún concepto el aparato ni tampoco realice trabajos de reparación por cuenta propia.

## Compatibilidad con auriculares

Das Produkt ist mit den meisten Hörgeräten auf dem Markt kompatibel. Allerdings besteht aufgrund des breiten Sortiments an verfügbaren Hörgeräten keine Garantie, dass das Produkt mit jedem Modell 'problemlos' arbeitet.

## Eliminación

Está obligado a deshacerse de los artículos de consumo de forma adecuada en conformidad con las disposiciones legales. El icono que aparece junto al producto indica que los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no son necesarios deben ser separados para su eliminación de los demás residuos domésticos.

## Información de seguridad

Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser depositados en los correspondientes puntos de recogida de residuos facilitados por las autoridades locales. El material de embalaje debe ser eliminado siguiendo las regulaciones locales.



## Puesta en marcha

### Puesta en marcha

#### 1. Compruebe el contenido del embalaje

Contenido	NL100
Bucle de inducción NL100	1
Batería AAA	1
Adaptador de producto de 2,5 mm a 3,5 mm	1
Manual de instrucciones	1

#### 2. Insertar batería

Coloque una batería AAA en el compartimento para baterías en la parte trasera del NL100. Tenga en cuenta los polos "+" y "-" y coloque la batería en la posición correcta. Cierre la tapa del compartimento para baterías.



**Atención: No utilice baterías recargables.**

#### 3. Conexión del NL 100

Conecte el NL100 como se indica en la imagen en el enchufe para auriculares de su teléfono y pase el cordón de cuello sobre su cabeza.



## Utilización del NL100

El NL 100 utiliza un sistema de bucle de inducción que trabaja junto con su auricular, cuando lo ajusta a modo T, de manera que pueda percibir mejor los ruidos.

1. Mueva el interruptor de ON/OFF en posición "ON". El LED verde de funcionamiento se enciende.



Si el LED de funcionamiento aparece en rojo indica un estado bajo de batería y por lo tanto deberá cambiar cuanto antes la batería.

2. Active su auricular en modo "T" o "MT"
3. Regule el volumen en la rueda de control.
4. Ahora su NL 100 está listo para que pueda hablar con su interlocutor a través del micrófono integrado.
5. Al finalizar la conversación vuelva a colocar el interruptor ON/OFF en posición OFF para conservar el rendimiento de la batería. El LED de funcionamiento se apagará.



Puede utilizar el adaptador de producto que se incluye en la entrega del NL 100 como conector para reproductores MP3 o móviles compatibles. Siga las indicaciones anteriores.

## Mantenimiento/Garantía

### Mantenimiento

- Limpie la superficie del producto con un trapo suave libre de pelusas
- Nunca utilice productos de limpieza o soluciones

### Garantía

Los dispositivos Amplicomms son fabricados y probados de acuerdo a los últimos métodos de producción. La utilización de materiales cuidadosamente seleccionados y una avanzada tecnología, garantizan una función sin interferencias y una larga duración de servicio. La garantía no será aplicable si la causa de la avería en el dispositivo se debe al operador de red o la posible instalación de una centralita privada. La garantía no se aplica a las baterías recargables o a los demás productos utilizados para cargar el dispositivo. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de adquisición. Dentro del periodo de garantía todos los desperfectos materiales o de fabricación serán atendidos de forma gratuita. La garantía quedará excluida si ha existido manipulación por parte del comprador o de terceros. Los daños causados por el manejo y operación indebida, colocación o almacenamiento inadecuado, conexión o instalación defectuosa, actos de fuerza mayor o acciones de influencia externa no están cubiertos por la garantía. En caso de reclamación nos reservamos el derecho a reparar las piezas defectuosas, sustituirlas o reemplazar el dispositivo. Las piezas o el dispositivo reemplazado deberán ser de nuestra propiedad. Las reclamaciones por daños y perjuicios quedan excluidas, a menos que se demuestre intencionalidad o negligencia grave por parte del fabricante.

Si dentro del periodo de garantía el dispositivo sigue mostrando defectos, póngase en contacto con su recibo de compra en la tienda donde compró el dispositivo Amplicomms. Todas los derechos de reclamación según las condiciones de la garantía conformes a estas disposiciones sólo tendrán validez frente al distribuidor del producto. Los derechos de garantía, según las condiciones de garantía, dejarán de tener validez dos años después de la compra y entrega de nuestro producto.

### Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los siguientes requisitos de la Directiva de la UE: Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. La conformidad con la directiva mencionada anteriormente se confirma mediante el símbolo CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu)



Distribuido por: Audioline GmbH, D-41460 Neuss



### Indicaciones importantes sobre la garantía

La garantía para su producto Amplicomms inicia el día de la compra. El derecho de garantía se aplica a los defectos atribuidos por desperfectos materiales o de fabricación. Los derechos de garantía quedarán excluidos si ha existido manipulación por parte del comprador o de terceros. Los daños causados por el manejo y operación indebida, colocación o almacenamiento inadecuado, conexión o instalación defectuosa, actos de fuerza mayor o acciones de influencia externa no están cubiertos por la garantía.

EN CASO DE GARANTÍA, PÓNGASE POR FAVOR EN CONTACTO ÚNICAMENTE CON LA TIENDA DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO Y NO OLVIDE MOSTRAR EL RECIBO DE COMPRA.

CON EL FIN DE EVITAR LARGAS E INNECESARIAS ESPERAS, POR FAVOR, NO ENVÍE LOS PRODUCTOS DE RECLAMACIÓN A NUESTRA DIRECCIÓN DE OFICINA.

SI TIENE PREGUNTAS REFERENTES AL MANEJO Y A LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

AUDIOLINE GmbH  
Neuss

Internet: [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu)  
E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)

ES

