



PowerTel 601


Istruzioni
d'uso




Scheda di riepilogo

In questa scheda di riepilogo trova tutti i componenti di funzionamento di PowerTel 601

Scheda di riepilogo

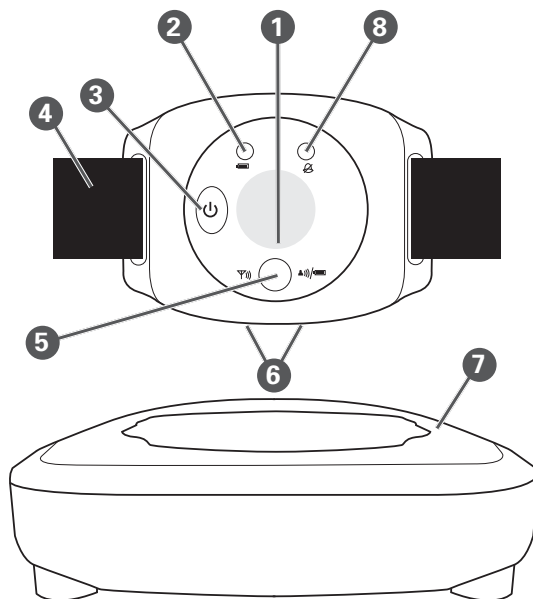

Posizione del tasto Pager

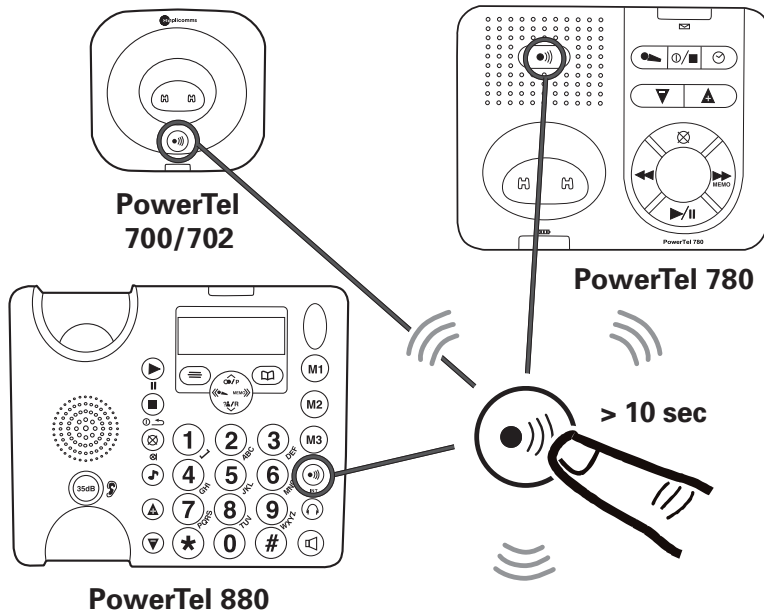



Scheda di riepilogo

- 1 Tasto di emergenza
Nota: solo in combinazione con il telefono PowerTel 680
- 2 LED rosso caricamento batteria
- 3 Interruttore on/off
- 4 Cinturino da polso
- 5 LED grande a due colori (verde o rosso): Modalità registrazione / Fuori dal raggio d'azione / Batteria debole
- 6 Contatti di ricarica
- 7 Stazione di caricamento
- 8 LED verde per le chiamate in entrata

Messa in funzione

Importante: Prima della messa in funzione del Suo telefono legga assolutamente gli avvisi di sicurezza a pagina 9.

Controllare il contenuto dell'imballaggio

Del volume di consegna di un PowerTel 980 fanno parte:

- 1 Allarme da polso con vibrazione e cinturino
- 1 Stazione di caricamento con trasformatore

Regolazione dell'allarme da polso a vibrazione in quattro semplici passaggi

1. Montare la stazione di caricamento


Collocare la stazione di caricamento:

- su una superficie asciutta, stabile e piana
- in modo che il trasformatore non costituisca un elemento d'inciampo
- a distanza di minimo un metro da altri dispositivi elettrici

2. Collegare la stazione di caricamento

Inserire il cavo della stazione di caricamento nella presa a muro.

Importante: Utilizzare solo l'adattatore fornito, perché, in caso contrario, non è garantito il regolare funzionamento del PowerTel 601 e il prodotto potrebbe subire dei danni.

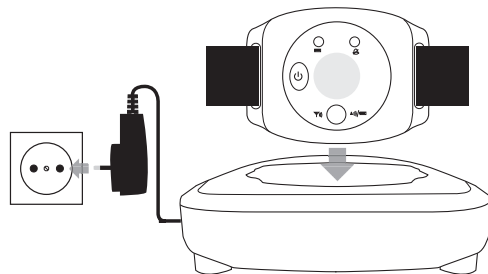

3. Sistemare l'allarme da polso con vibrazione sulla stazione di caricamento

Porre l'allarme da polso con vibrazione nella parte inferiore della stazione di caricamento con entrambi i due piccoli contatti. Se l'allarme viene caricato in modo corretto, comparirà un LED rosso sul simbolo della batteria.

Prima del primo utilizzo, l'allarme da polso con vibrazione deve essere caricato






almeno 10 ore (verificare l'alimentazione di corrente della stazione di caricamento!).


Nota: se le batterie dell'allarme da polso con vibrazione sono completamente cariche, dovrebbero durare almeno cinque giorni. Quando le batterie diventano deboli, si accende un LED rosso più grande, che lampeggia lentamente. A quel punto l'allarme da polso con vibrazione deve essere ricaricato almeno dieci ore.


4. Registrare l'allarme da polso a vibrazione sul proprio telefono PowerTel.

Importante: se l'allarme da polso a vibrazione non è stato acquistato contemporaneamente al telefono, è necessario prima registrarlo sul proprio telefono.

- Attivare l'allarme da polso a vibrazione tenendo premuto il tasto  per circa cinque secondi.
- Mantenere poi premuto il tasto  per altri 12 secondi, finché il LED verde di registrazione non incomincia a lampeggiare rapidamente. Dopodiché l'allarme da polso a vibrazione rimane per circa 1 minuto nella modalità di registrazione.
- Attivare la modalità di registrazione sul proprio telefono PowerTel.

Per i modelli **PowerTel 700, 702 o 780** procedere come segue: mantenere premuto il tasto di registrazione  per circa 10 secondi, finché il LED di carica non lampeggia.

Sul modello **PowerTel 880** procedere come segue:
mantenere premuto il tasto , finché non appare sul display la scritta **“registrare”**.

Avvertenza: per capire dove si trova esattamente il tasto di registrazione  sul proprio telefono, vedere la parte anteriore della copertina.


- L'allarme da polso a vibrazione è regolarmente registrato e pronto all'uso quando il LED di registrazione si illumina di verde (non lampeggia).


Nota: se il LED lampeggia con colore alternato rosso e verde, significa che il vostro allarme da polso con vibrazione non è registrato o è al di fuori del raggio d'azione. Avvicinatevi al vostro telefono PowerTel per tornare entro il raggio d'azione.



Utilizzo dell'allarme da polso con vibrazione

Accensione

Tenete premuto il pulsante on/off  per circa cinque secondi. Il LED verde si accenderà con il triangolo di segnalazione.

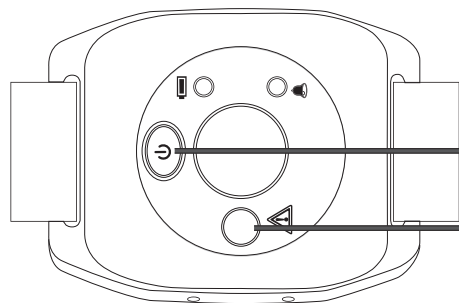


Accendere / spegnere

Modalità registrazione / Al di fuori del
raggio d'azione / Batteria debole

Nota: se il LED lampeggia con colore alternato rosso e verde, significa che il vostro allarme da polso con vibrazione non è registrato o è al di fuori del raggio d'azione. Avvicinatevi al vostro telefono PowerTel per tornare entro il raggio d'azione. Se il LED continua a lampeggiare, dovete registrare il vostro allarme da polso con vibrazione come descritto a pagina 3.



Spegnimento

Tenete premuto il pulsante on/off  per circa cinque secondi. Il LED verde si spegnerà.

Cinturino

Il cinturino è già montato all'allarme da polso con vibrazione. Se desiderate montarlo di nuovo successivamente o correggere la sua posizione, procedete come di seguito: Spingete il cinturino attraverso l'apertura da un lato dell'allarme da polso con vibrazione (da davanti all'indietro), conducetelo intorno al lato posteriore e spingetelo quindi attraverso l'altra apertura (da dietro in avanti).

Ora potete portare l'allarme con vibrazione al polso e fissarlo comodamente con la chiusura in velcro.

Raggiungibilità dell'allarme da polso con vibrazione

Se l'allarme da polso con vibrazione si trova al di fuori del raggio d'azione del telefono, non funzionerà. A quel punto il LED grande lampeggerà con il triangolo di segnalazione e con un colore alternato verde e rosso. In questo caso, avvicinatevi al vostro telefono PowerTel per poter registrare correttamente l'allarme da polso con vibrazione.

Batteria debole

Se la batteria diventa più debole, il LED grande diventerà da verde a rosso e lampeggerà. Riponete quindi l'allarme da polso con vibrazione per 10 ore sulla stazione di caricamento, fino a quando la batteria è di nuovo carica.



Chiamate in entrata

Quando arriva una chiamata, l'allarme da polso a vibrazione vibra e sul display appare il simbolo di una campana.

È possibile accettare e terminare tale chiamata sul proprio telefono PowerTel, come di consueto.



Se dovessero esserci dei problemi

In caso di problemi con il proprio dispositivo, verificare in primo luogo le seguenti indicazioni. In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra linea di assistenza diretta. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Web www.amplicomms.com

In caso di diritti alla garanzia rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

La garanzia è pari a 2 anni.

Ricerca errori

Il mio allarme da polso a vibrazione non vibra quando arriva una chiamata

Verificare di aver registrato l'allarme a vibrazione. Se l'allarme da polso a vibrazione non è stato acquistato contemporaneamente al telefono, è necessario prima registrarlo. Per farlo, vedere il passaggio 4 della "Messa in funzione" a pagina 3.

Se l'allarme da polso a vibrazione è registrato, ma non vibra alle chiamate in arrivo, ci si trova presumibilmente fuori dalla portata. Avvicinarsi al telefono.

Il display lampeggia rosso

La batteria si sta scaricando. Posizionare l'allarme da polso a vibrazione sulla stazione di carica per la ricarica. La ricarica completa richiede circa dieci ore.



Informazioni generali

Informazioni di sicurezza

Leggere con cura le presenti istruzioni per l'uso. Non aprire mai l'apparecchio né eseguire direttamente delle riparazioni.

Luogo di posizionamento

Installare la stazione di carica come di seguito indicato:

- Su un sottofondo asciutto, diritto e solido
- In modo tale che il cavo di rete non diventi un ostacolo su cui inciampare
- A una distanza minima di un metro da altre apparecchiature elettriche
- Ben protetto da fumo, polvere, vibrazione, sostanze chimiche, umidità, calore e insolazione diretta

Approvvigionamento elettrico

Importante: Utilizzare solo l'adattatore fornito con il PowerTel 601, perché, in caso contrario, non è garantito il regolare funzionamento e il prodotto potrebbe subire dei danni.

Adattatore a risparmio energetico

Gli adattatori di rete contenuto nel volume di consegna corrisponde ai requisiti del design ecologico dell'UE per i prodotti a funzionamento elettrico (direttiva CEE 32 del 2005).



- Énergiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Il consumo energetico per questo è notevolmente ridotto sia in condizioni di funzionamento che di disponibilità rispetto agli adattatori di modelli più vecchi.

Black-out

In caso di black-out, il prodotto non funziona più. Occorre, quindi, adottare delle misure speciali per chiamate d'emergenza.

Apparecchi medici

Non utilizzare il proprio allarme da polso a vibrazione:

- Vicino a apparecchiature di emergenza o di medicina intensiva
- Durante un acquazzone

Se porta un pacemaker, deve assolutamente consultare il Suo medico prima di utilizzare questo prodotto.

Smaltimento

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esausto consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esausti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di raccolta rifiuti differenziata.

Il simbolo indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!





Accumulatori e batterie possono provocare danni alla salute e all'ambiente! Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e batterie. Questi possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente. Per legge sussiste l'obbligo di consegnare accumulatori e batterie presso i rivenditori di batterie utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare accumulatori e batterie nei rifiuti domestici, ma che vanno conferiti ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta. Smaltire confezioni ed imballaggi in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

Consigli per la cura

- Pulire le superfici degli apparecchi con un panno morbido e antipilling.
- Non utilizzare mai detergenti o solventi.

Garantie

Gli apparecchi AMPLICOMMS sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata di vita. Non si considera caso di garanzia un malfunzionamento dell'apparecchio la cui causa vada individuata nella sfera di responsabilità del gestore o provider di rete telefonica. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o battery pack utilizzati all'interno degli apparecchi. Il pe-

riodo di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi.

I danni derivanti da un trattamento o utilizzo non conforme agli usi previsti, da naturale usura, da errato montaggio o errata conservazione, da collegamento o installazione impropri, da forza maggiore o altri influssi esterni sono esclusi dalla garanzia. Ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire i pezzi difettosi o di rimpiazzare l'apparecchio. I pezzi sostituiti o gli apparecchi rimpiazzati divengono di nostra proprietà. Sono esclusi eventuali diritti al risarcimento dei danni qualora non siano dovuti a dolo o colpa grave del costruttore. Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio AMPLICOMMS assieme al relativo scontrino di acquisto. In base a quanto riportato nelle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere rivendicati nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile far valere alcun diritto di garanzia.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio soddisfa i requisiti della Direttiva UE:



1999/5/CE Direttiva concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità della direttiva sopra indicata è confermata dal marchio CE applicato sul dispositivo. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito Internet www.amplicomms.com .



Audioline GmbH, D-41460 Neuss

03/2014 – Version 1.0

