




TCL 210 Travel

Bruksanvisning

**Åpne denne siden å få en
introduksjon på ditt produkt.**

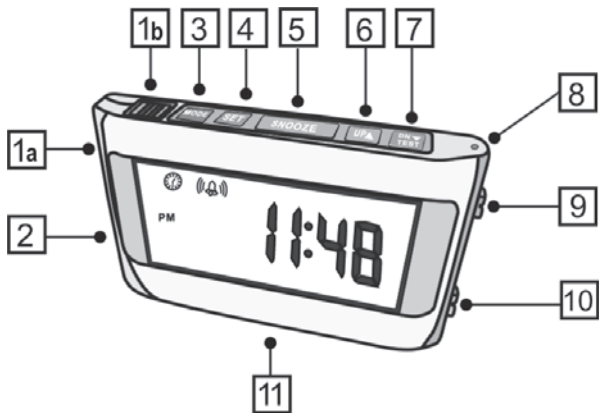

- 1a Innebygd lys
- 1b Bryter for lys
- 2 Alarmmodusbryter
(Lyd+vibrasjon,vibrasjon,lyd,av)
- 3 Modus (alarm, timer, temperatur)
- 4 SET (For å bekrefte en valgt innstilling)
- 5 Slumre
- 6 UP ▲
- 7 DN ▼ / TEST
- 8 Feste til puteklips
- 9 Lydalarm tonekontroll(1-2-3=lav-medium- høy)
- 10 Volumkontroll for alarm(1-2-3=lav-medium-høy)
- 11 Batterirom (Bak)

Innhold


- Vibrerende alarmklokke
- 3AA batterier
- Puteklips
- Bruksanvisning

Sett inn batteriene

Sett inn de 3 medfølgende AA batteriene, følg med på batteripolene slik at de sitter riktig.


Batteriene vil vare i ca 8-10 måneder ved vanlig bruk.

Stille inn klokken

1. Trykk og hold **SET** inne i 2 sekunder.  vil da begynne å blinke.
2. Still først inn timer (24 eller 12 timer/AM= formiddag, PM = ettermiddag. Trykk på **UP ▲** for å justere klokken. Trykk på **SET** for å bekrefte innstillingen.
3. Trykk på **UP ▲** eller **DN ▼** for å justere klokkeslett i timer og minutter, bekreft innstillingen med å trykke **SET**.

Alarmtid og slumre

Alarmmodusbryteren må ikke stå på **OFF**.

1. Trykk på **MODE** en gang for å gå til alarmfunksjonen.  blinker. Trykk og hold inne **SET** i 2 sekunder for å bekrefte.





2. Trykk på **UP ▲** eller **DN ▼** for å stille inn timer og minutter og bekreft hvert valg med **SET**-knappen. **SNOZ** vil da begynne å blinke.
3. Trykker du på **SET** er nå slumrefunksjonen slått på. Hvis du nå trykker på **UP ▲** så vil **SNOZ** slutte å blinke. Trykker du deretter på **SET** så er slumrefunksjonen slått av.

NB: Hvis slumrefunksjonen er slått på, vil alarmen gå i 40 sekunder før den stopper. Hvis man trykker på slumreknappen når alarmen er i gang, vil den stoppe umiddelbart og deretter starte igjen etter 8minutter. Dette kan man gjenta opptil 7 ganger. For å stoppe alarmklokken helt, på hvilket som helst tidspunkt, trykk på en av de andre knappene på top-

pen av klokken.

Hvis slumrefunksjonen er avslått: Trykk på slumreknappen for å stoppe alarmen helt.

Sette på alarmmodus og slumre



1. Skyv alarmknappen til **OFF** for å stoppe alarmen når som helst.
2. Skyv bryteren til **AUDIO** ( / Lyd), **SHAKER** ( / Vibrasjon) eller **ALL** (Lyd + Vibrasjon) for å velge alarmmodus og sette på alarmen.

Teste alarmen

1. Trykk og hold inne **DN ▼ / TEST** i 3 sekunder, alarmen vil da låte i ca 10 sekunder, klokken returnerer deretter til vanlig klokkemodus.




Timermodus

1. Trykk på **MODE** to ganger for å gå til timermodus. Timerikonet  vil da blinke. Trykk og hold inne **SET** for å bekrefte valget.
2. Trykk på **UP ▲** eller **DN ▼** for å stille inn timer og minutter. Bekreft innstillingene ved å trykke på **SET** for hver av dem.
3. Trykk på **DN ▼** innen 5 sekunder for å starte nedtellingen. , **H** og **M** vil begynne å blinke når klokken tikker nedover. Hvis **DN ▼** ikke blir trykt på innen 5 sekunder, vil klokken returnere til vanlig klokkemodus.

NB: Når tiden er ute, vil alarmen begynne å låte i 30 sekunder. Den kan også stoppes ved å trykke på en av knappene på toppen av klokken. For å stoppe

timeren før tiden er ute, trykk på **DN ▼** . Klokken vil da returnere til vanlig klokkemodus.

Termometermodus

1. Trykk på **MODE** tre ganger for å gå til termometermodus  . Romtemperaturen vil dukke opp på displayet.
2. Hvis nødvendig, trykk **UP ▲** for å bytte mellom Celcius og Fahrenheit (°C eller °F).
3. Klokken vil returnere til vanlig klokkemodus etter 5 sekunder.

Spesifikasjoner

Funksjoner: Klokke, alarmklokke, timer, termometer og lys.

Klokkemoduser: 12 eller 24 timer

Alarmmoduser: audio, vibrasjon, audio&vibrasjon

Termometermodus: °C eller °F

Størrelse: 118x71x27mm

Vekt: 140g

Strømbehov: 3AA alkalinebatterier (medfølger)

Batterilevetid: 8-10 måneder ved vanlig bruk.

Avfall



Batterier er spesialavfall og kan derfor ikke kastes i vanlig søppelcontainere.

Vedlikehold

- Bruk en tørr og lofri klut for rengjøring av klokken.
- Bruk ikke såpe eller andre rengjøringsmidler.

Kundeservice

Ved tekniske problemer bes du ta kontakt med vår kundeservice.

Telefonnummeret finner du på vår hjemmeside

www.amplicomms.com

Ved reklamasjonskrav bes du ta kontakt med din forhandler. Garantien gjelder i 2 år.

Garanti

AMPLICOMMS-utstyr produseres og testes med de nyeste produksjonsfremgangsmåtene. Bruken av samvittighetsfullt utvalgte materialer og høyt utviklede teknologier sikrer en drift uten forstyrrelser og med lang levealder.

Garantien gjelder ikke for oppladbare batterier, ladere eller batteripakker som brukes i produktene.

Garantitiden varer i 24 måneder fra og med kjøpsdato. I løpet av garantitiden korrigeres alle mangler som skyldes materialfeil eller produksjonsfeil, gratis. Garantien opphører ved inngripen fra kjøper eller tredjeperson. Garantien gjelder ikke ved skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller betjening, gal plas-

sering eller lagring, inadekvat tilkobling eller installasjon, høyere makter eller annen ytre påvirkning.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller bytte ut defekte deler eller stille nytt utstyr til rådighet. Deler eller utstyr som blir byttet ut, tilfaller oss.

Skadeerstatning er utelukket hvis det ikke kan påvises at produsenten har vært forsettlig eller grov uaktsom. Hvis utstyret blir defekt i løpet av garantitiden, tar du kontakt med butikken hvor du kjøpte AMPLICOMMS-utstyret og viser frem kvitteringen. Reklamasjonskrav i henhold til disse bestemmelsene kan kun fremmes overfor forhandleren.

Ingen garantikrav kan gjøres gjeldende mer enn to år etter at produktene ble kjøpt.


Samsvarsærklæring

Dette produktet tilfredstiller alle krav i EU direktiv 2004/108/EC for elektromagnetisk kompatibilitet.



Samsvar med dette direktivet bekreftes av CE symbol på produktet.

For å få tilgang til komplette sertifikater besøk hjemmesiden: **www.amplicomms.com**.

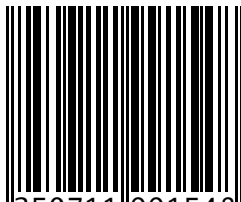

4 250711 991548



Distribusjon: Audioline GmbH

D-41460 Neuss

08/2012 – Utgave 2.0

