

TA 10

Amplificateur universel de téléphone

Mode d'emploi



Félicitations d'avoir choisi l'amplificateur de téléphone TA 10. Cet appareil est compatible avec tous les téléphones filaires, pour lesquels le cordon de raccordement du combiné peut être connecté des deux côtés. Le TA 10 améliore la sonorité et augmente le volume sonore des appels téléphoniques arrivant, facilitant ainsi la conversation téléphonique pour les personnes atteintes d'un endommagement de l'ouïe.

Indications de sécurité

Attention : Votre téléphone peut restituer des volumes sonores très élevés avec cet appareil, quand l'amplificateur est activé et le volume sonore est réglé au maximum. Une grande prudence est recommandée en cas de changement entre un utilisateur avec une ouïe normale et un utilisateur avec une ouïe réduite.


- Lisez ce mode d'emploi entièrement avec soin et conservez-le bien.
- Raccordez seulement des accessoires autorisés.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur de bâtiments. Ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, une machine à laver, un évier, dans des pièces humides ou près d'une piscine.
- Détachez toujours le câble de raccordement en le tirant par la fiche, jamais par le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si un câble, une fiche ou le boîtier est défectueux, si vous constatez un dysfonctionnement ou si l'appareil est tombé. Dans ce cas, adressez-vous à votre marchand en vue d'un contrôle et d'une réparation de l'appareil, le cas échéant.
- Utilisez seulement les piles ou le bloc d'alimentation (non livré) indiqués dans le mode d'emploi. Ne jetez jamais les piles dans le feu, elles pourraient exploser.
- Le cas échéant, utilisez seulement le bloc d'alimentation recommandé (non livré) et veillez à ce que l'accès au bloc d'alimentation ne soit pas obstrué par des meubles ou d'autres objets.
- Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. Vous risquez une électrocution par coup de foudre.
- N'utilisez jamais un téléphone à proximité d'une fuite de conduite de gaz quand vous souhaitez en informer quelqu'un.

Utilisation conforme aux dispositions


Cet appareil est prévu pour le raccordement d'un téléphone filaire, pour lequel le cordon de raccordement du combiné peut être connecté des deux côtés. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux dispositions. Les modifications ou transformations arbitraires sont interdites. N'ouvrez l'appareil vous-même en aucun cas et n'effectuez aucune tentative de réparation de votre propre chef.

Installation et fonctionnement

- Insérez une pile de 9 Volt (non livrée) dans le compartiment à pile, dans la partie inférieure de l'appareil, et connectez l'amplificateur TA 10 et votre téléphone comme illustré. Le cas échéant, utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du compartiment à pile. Utilisez uniquement le câble de raccordement livré pour connecter le TA 10 et votre téléphone. (**Indication :** n'observez pas l'indication de fonctionnement « marche/arrêt » pendant le réglage. L'indication est sans signification à ce moment précis).
Par précaution, séparez toujours le TA 10 de votre téléphone quand vous remplacez la pile.

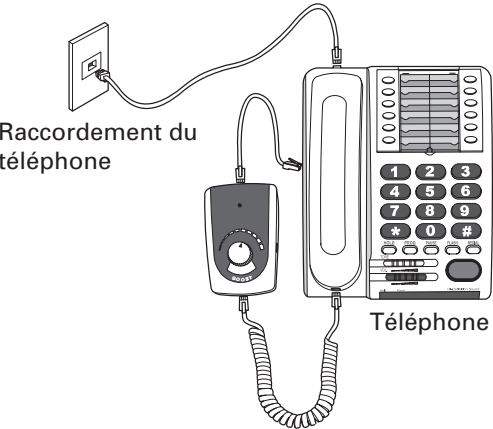

- Mettez le régulateur de volume en position centrale. Mettez le sélecteur de la sonorité en position 2.

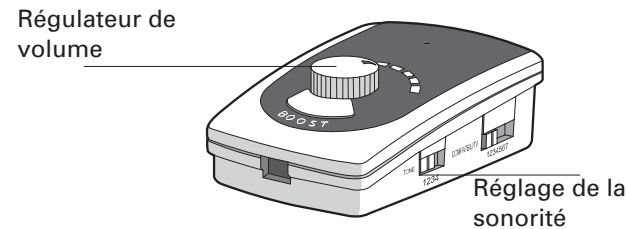

- Régler le sélecteur : ce sélecteur a 7 positions. Les positions 1 à 6 servent au réglage de la compatibilité (adaptation au téléphone). La position 7 est un « bypass », donc un « contournement » de la fonction de l'amplificateur. Ce réglage peut être réglé, par exemple, si des personnes, dont l'ouïe est normale, veulent utiliser le téléphone ou si l'alimentation électrique de l'appareil ne fonctionne plus (pile vide, par exemple)


Contenu de la livraison

Amplificateur de téléphone TA 10
Mode d'emploi
Câble de connexion

Éléments de commande

- Régulateur de volume
- Voyant de fonctionnement « marche/arrêt »
- Sélecteur
- Réglage de la sonorité
- Prise de raccordement pour le cordon du combiné
- Touche et LED BOOST
- Prise de raccordement pour le câble du téléphone
- Prise de raccordement pour l'appareil d'alimentation (non inclus dans la livraison)
- Couvercle du compartiment à pile


Une pile de 9 V (non incluse dans la livraison) est nécessaire au fonctionnement.

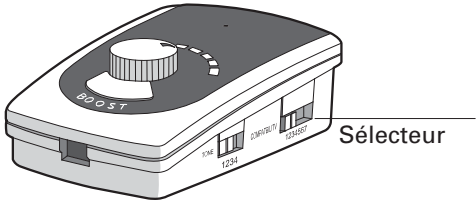


- Placez le sélecteur en position 1 (**indication :** ceci est le réglage le plus utilisé, fonctionnant avec la plupart des téléphones. N'observez pas l'indication de fonctionnement « marche/arrêt » pendant le réglage. L'indication est sans signification à ce moment précis).
- Débranchez le combiné et vérifiez si vous pouvez entendre la tonalité.
- Si la tonalité n'est pas clairement audible, raccrochez le combiné et placez le sélecteur dans la position suivante – par exemple 2. Répétez l'étape B.
- Si la tonalité est clairement audible, vérifiez si vous pouvez augmenter ou réduire la tonalité avec le régulateur de volume. Si vous y parvenez, continuez avec l'étape F.
- S'il n'est pas possible de modifier le volume sonore, raccrochez le combiné et placez le sélecteur dans la position suivante. Répétez l'étape B.
- Appelez quelqu'un et vérifiez si vous pouvez vous entendre mutuellement.
- Si vous êtes satisfait de la compréhension, vous avez réussi les réglages. Le cas échéant, notez le réglage du sélecteur. Continuez avec l'étape 4.
- Si vous n'êtes pas satisfait de la compréhension, testez d'autres positions du sélecteur jusqu'à ce que le résultat corresponde à vos attentes. (**Indication :** testez simplement différentes positions du sélecteur jusqu'à ce que la compréhension soit claire et nette).

- Pendant une conversation, vous pouvez monter ou baisser le volume sonore du combiné en tournant le régulateur de volume. (**Indication :** si vous entendez des sifflements désagréables dans le combiné, baissez le volume sonore).

- Pendant une conversation téléphonique, modifiez la position du sélecteur de la sonorité pour trouver la position, dans laquelle la qualité de restitution de votre partenaire téléphonique est la plus meilleure. Si vous entendez des sifflements désagréables dans le combiné, baissez le volume sonore. Gardez ce réglage à l'avenir. Vous n'avez plus besoin de le modifier. Le cas échéant, notez ce réglage.

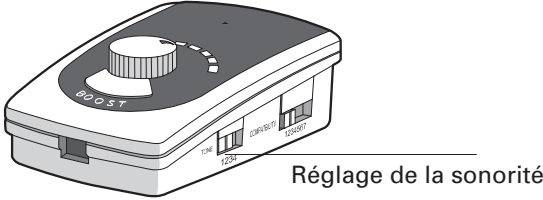



- Appuyez sur la touche BOOST et gardez-la appuyée. Vérifiez si la voix de votre partenaire téléphonique est restituée plus fortement et si la LED BOOST est allumée. Si vous voulez parler vous-même, vous devez relâcher la touche, car votre voix n'est pas transmise à votre partenaire téléphonique quand la touche est appuyée.

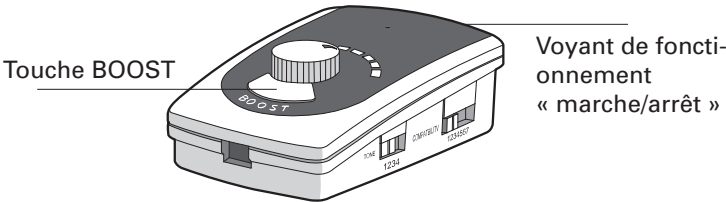

- Le voyant de fonctionnement « marche/arrêt » est allumé pendant la communication téléphonique. Il s'éteint environ 10 à 20 secondes après que le combiné est raccroché ou si aucun bruit/aucune langue n'est constaté(e) pendant environ 10 à 20 secondes.

- En cas d'usage moyen, une pile alcaline de 9 V alimente l'appareil pendant environ 6 à 12 mois. Changez la pile si le voyant de fonctionnement « marche/arrêt » est sombre ou si la sonorité du combiné devient plus mauvaise.

- D'une manière optimale, vous pouvez raccorder un bloc d'alimentation de 9 Volt (non inclus dans la livraison). Cet appareil d'alimentation se charge de l'alimentation électrique du TA 10. Dans ce cas, la pile assure l'alimentation du TA 10 en cas de panne de courant. Pour garantir un fonctionnement sûr, il est conseillé de renouveler la pile environ tous les 2 ans. Le cas échéant, renouvelez-la avant de remarquer que le voyant de fonctionnement « marche/arrêt » ne s'allume pas pendant une panne de courant et pendant l'utilisation.

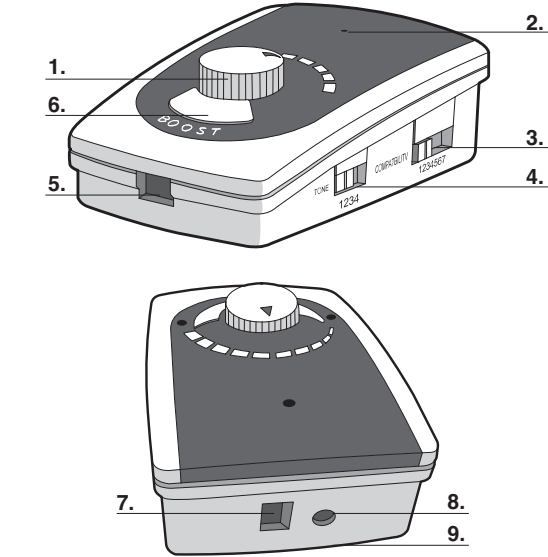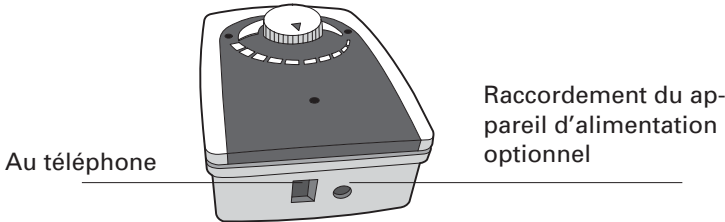

Recherche et solution des défauts

Hotline du service-clients

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, contrôlez tout d'abord les indications suivantes. En cas de problèmes techniques, veuillez s'il vous plaît contacter notre service d'assistance téléphonique au : **0826 100 389** (numéro indigo). Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

- Le voyant de fonctionnement « marche/arrêt » ne s'allume que faiblement ou pas du tout : changez la pile.
- Vous ne pouvez pas entendre la tonalité ou votre partenaire téléphonique ou votre partenaire téléphonique ne peut pas vous entendre : vérifiez la position du sélecteur. Si nécessaire, répétez les réglages comme décrit à l'étape 3, points A à D.
- Sifflements désagréables dans le combiné : diminuez le volume sonore ou modifiez la position du sélecteur de réglage de la sonorité.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	Pile alcaline de 9 Volt (non incluse dans la livraison)
Consommation électrique	10 mA (typique) ; Arrêt automatique en cas de silence/combiné raccroché
Durée de vie de la pile	6-12 mois, en fonction de la durée d'utilisation
Amplification sans BOOST	30 dB
Amplification avec BOOST	45 dB
Temps d'arrêt automatique (pour économiser la pile)	10-20 secondes de silence (aucun bruit/aucune voix)
Sélecteur	6 positions + position « bypass » (7)
Voyants	Voyant de fonctionnement « marche/arrêt » et BOOST
Éléments de commande	Volume sonore, BOOST, Sonorité, Compatibilité
Appareil d'alimentation optionnel	9 V DC, 300 mA (non inclus dans la livraison)
Température ambiante de service	0 à 45° C
Température de stockage	-20 à 50° C

Élimination

Vous êtes obligés par la loi d'éliminer les biens d'équipement ménagers d'une manière appropriée. Le symbole ci-contre sur votre appareil signifie que les vieux appareils électriques et électroniques et les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques et électroniques auprès du centre de collecte d'un organisme d'élimination des déchets approprié. Éliminez les piles dans le commerce distributeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte compétents, qui mettent des bacs correspondants à votre disposition. Les matériaux d'emballage sont à éliminer selon les consignes locales.

Indications d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et sans peluche.
- N'utilisez aucun nettoyant ni solvant.

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des techniques hautement développées assurent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. Un dysfonctionnement de l'appareil causé par l'exploitant du réseau téléphonique ou une éventuelle installation d'abonné intercalée ne constitue pas un cas de garantie. La garantie ne s'applique pas pour les piles, accus ou lots d'accus utilisés dans les produits. La durée de garantie s'élève à 24 mois, calculée à partir de la date d'achat. Pendant la durée de garantie, il est remédié gratuitement à tous les défauts résultant de vices de matériel ou de fabrication. Le droit de garantie disparaît en cas d'intervention sur l'appareil par l'acheteur ou par un tiers. Les dommages résultant d'une manipulation ou d'une utilisation incorrecte, de l'abrasion naturelle, d'une mauvaise mise en place ou conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrecte ainsi que d'une force majeure ou d'autres influences extérieures, ne sont pas soumis à la garantie. En cas de réclamation, nous nous réservons le droit d'améliorer, de remplacer les parties défectueuses ou de remplacer l'appareil. Les parties ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les droits de dommages et intérêts sont exclus, dans la mesure où ils ne reposent pas sur une intention ou une grave négligence du fabricant. Si, malgré tout, votre appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin, dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS, en présentant votre ticket de caisse. Tous les droits de garantie selon ces dispositions sont à faire valoir exclusivement auprès de votre marchand spécialisé. Après expiration de deux ans suivant l'achat et la remise de nos produits, les droits de garantie ne peuvent plus être faits valoir.

Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences de la directive UE : Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité avec la directive citée ci-avant est confirmée par le marquage CE apposé sur cet appareil. Pour obtenir la déclaration de conformité complète, veuillez utiliser le téléchargement gratuit sur notre site internet **www.amplicomms.eu**.

