



Laço de indução Bluetooth ©



Manual de Instruções

NL 200

1 Informação de segurança

Por razões de segurança, não utilize este produto perto de máquinas, uma vez que o cordão indutivo pode emaranhar-se nas peças móveis.

Uso previsto

O dispositivo de indução NL200 foi desenvolvido para conexão com telefones celulares com tecnologia Bluetooth ®. Em combinação com um telefone com Bluetooth ® funciona como mãos livres com interface com aparelhos auditivos. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e inadequada.

As mudanças ou transformações por conta própria não são permitidos. Sob nenhuma circunstância você deve abrir o aparelho ou realizar trabalhos de reparação.

Por favor, leia este manual de instruções.

Compatibilidade com aparelhos auditivos

O produto é compatível com a maioria dos aparelhos auditivos disponíveis no mercado. Não entanto, devido á enorme oferta de aparelhos auditivos, não podemos garantir que funcione com todos sem problemas. (HAC Hearing Aid Compatible to T3 Rating)



Atenção:

Se é usuário de Pacemaker e deseja utilizar o sistema Indução NL200, deve consultar o seu médico sobre essa possibilidade. Neste caso, se sentir algum problema ao utilizar o NL200 deve desligá-lo imediatamente

Fonte de alimentação



Atenção:

Utilize a fonte de alimentação com o cabo fornecido, já que outras fontes podem provocar danos no equipamento. Procure não bloquear o acesso á fonte de alimentação com móveis ou outros objetos.

Eliminação

Para abater o seu produto, por favor, entregue-o num centro de recolha local (por exemplo, um centro de reciclagem). De acordo com a lei de equipamentos eléctricos e electrónicos, os proprietários de aparelhos utilizados são obrigados por lei a fazer uma classificação / separação dos equipamentos eléctricos e electrónicos dos resíduos comuns. O símbolo constante no equipamento significa que, em qualquer caso, não deve juntar os aparelhos a reciclar com o lixo doméstico!

Tal acto apresenta perigos para a saúde e ambientais causados pelas baterias recarregável e pilhas!

Jamais se deve abrir, danificar, ingerir, nem permitir que as baterias recarregáveis sejam abandonadas no meio ambiente. Podem conter metais pesados tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente.

Você é obrigado por lei de segurança a eliminar baterias recarregáveis e pilhas através



de um distribuidor comercial de baterias e pilhas, ou em pontos de recolha autorizados para esse efeito. Este serviço de recolha é gratuito. Os símbolos que acompanham significa que as pilhas e baterias recarregáveis, em nenhum caso devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico e devendo ser eliminados através de pontos de recolha específicos. Os materiais de embalagem devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.



2 Inicialização do dispositivo

Comprovar o conteúdo da embalagem. Esta deve incluir o seguinte:

Conteúdo	NL200
Laço de indução Bluetooth	1
Fonte de alimentação	1
Manual de instruções	1

Carregar a bateria recarregável

1. Conecte a fonte de alimentação á corrente (7).
2. Quando o NL200 está a carregar, acende-se o LED de estado (3) a vermelho.
3. Se o NL200 está completamente carregado, o LED de estado (3) não se acende.

O tempo de carga é de 5 horas.

Para preservar a funcionalidade do dispositivo, quando o uso é pouco frequente, é necessário carregar a bateria interna pelo menos uma vez cada 3 meses!




Utilize unicamente a fonte de alimentação fornecida que apresenta uma saída de 5 VDC, 200 mA.

Bateria recarregável baixa (pouca carga)

Se a bateria recarregável do NL200 está baixa, é apresentado um sinal sonoro de advertência durante a conversação.

Carregue a bateria recarregável segundo a descrição do capítulo Carregar a bateria recarregável.

Elementos de comando

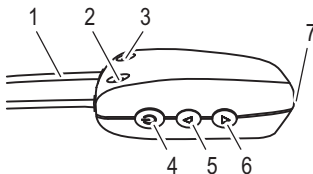

- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|
| 1 | Laço de indução | 5 | Tecla para aumentar o volume |
| 2 | Micrófone | 6 | Tecla para baixar o volume |
| 3 | LED de estado | 7 | Conexão da fonte de alimentação |
| 4 | Tecla On/OFF | | |

3 Utilização do NL200

O NL200 utiliza um sistema de laço de indução que funciona em combinação com o seu aparelho auditivo. Para poder utilizar o NL200 é necessário que se coloque o mesmo á volta do pescoço e que este estabeleça comunicação com o seu telemóvel.



Deve ter em conta as indicações de segurança do capítulo 1.

No capítulo seguinte se descreve as diferentes funções do NL200.

Emparelhamento do NL200 com o telemóvel

Antes de utilizar o NL200 pela primeira vez é necessário emparelhá-lo com o seu telemóvel.

1. Ligue a função de Bluetooth® do seu telemóvel.
2. Mantenha pulsada a tecla ON/OFF (4) do NL200 até que o LED de estado (3) comece a piscar alternadamente em azul e vermelho.
3. Active a função de busca de novos dispositivos Bluetooth® do seu telemóvel.
4. Espere até que o telemóvel encontre o NL200.
5. No ecrã do seu telemóvel deve aparecer agora o dispositivo com o nome "KSY-01".
6. Selecione este dispositivo e introduza o código "0000".
7. Se o emparelhamento teve êxito e o NL200 está conectado ao seu telemóvel, então o LED de estado (3) pisca em azul.

Ligar o NL200

Em caso de uma nova utilização do NL200 não é necessário voltar a realizar o emparelhamento com o telemóvel. Uma vez ligado o NL200, este conecta-se automaticamente com o telemóvel pré-definido.



A função de Bluetooth® do telemóvel deve estar activada.

1. Mantenha pulsada a tecla ON/OFF (4) até que o LED de estado (3) se ilumine em azul.
2. Pouco tempo depois, o LED de estado (3) pisca em azul e o emparelhamento com o telemóvel está realizado.

Desligar o NL200

1. Mantenha pulsada a tecla ON/OFF (4) até que o LED de estado (3) se apague.

Subir o volume

1. Pulse a tecla para subir o volume (5) durante uma conversa até ter ajustado ao volume desejado.
2. Uma vez alcançado o volume máximo, soa um sinal de advertência.

Baixar o volume

1. Pulse a tecla para baixar o volume (6) durante uma conversa até ter ajustado ao volume desejado.
2. Uma vez alcançado o volume mínimo, soa um sinal de advertência.

Interromper processo marcação /

Terminar uma chamada

1. Pressione brevemente a tecla ON/OFF (4) para interromper o processo de marcação e / ou para terminar a chamada.

NOTA: Devido à grande variedade de telefones celulares com Bluetooth e outros dispositivos de comunicação, pode ser necessário terminar algumas chamadas diretamente no seu telemóvel. Noutros pode terminar a chamada no NL200.

Pode mesmo ter de desconectar o dispositivo com NL200, não sendo necessário terminar a chamada.

Para evitar custos de chamada ou qualquer outro inconveniente é recomendado testes de compatibilidade para esta função com o seu dispositivo.

Receber uma nova chamada

1. Pulse brevemente a tecla ON/OFF (4) para receber a chamada.

Controlo por voz

Pode controlar o controlo por voz do seu telemovel através do NL200. O requisito é que o seu telemovel suporte esta função. Consulte o manual de instruções do seu telemovel para informação mais detalhada.

1. Se o NL200 se encontra em modo de repouso, pulse brevemente a tecla ON/OFF (4).
2. O telemovel recebe agora os comandos verbais através do microfone do NL200.

4 Indicações de manutenção e garantia

Indicações de manutenção

- Limpe as superfícies da carcaça com um pano suave e sem pelos.
- Não utilize agentes de limpeza nem dissolventes.

Garantia

Os dispositivos AMPLICOMMS são fabricados e testados de acordo com os processos de produção mais modernos. Os materiais selecionados e tecnologia sofisticada permite um funcionamento sem falhas e uma longa vida. A garantia não se aplica a baterias recarregáveis ou pilhas recarregáveis utilizadas nos produtos. O período de garantia é de 24 meses, a partir do dia da compra. Dentro do período de garantia, serão corrigidos todos os defeitos atribuíveis ao material defeituoso ou à mão de obra. O direito da garantia é anulada em caso de intervenção por parte do cliente ou por terceiros não autorizados.

Estão excluídos dos benefícios da garantia qualquer dano causado por um tratamento ou manuseamento inadequado, uso e desgaste, instalação ou armazenamento inadequados, instalação ou conexão incorreta, e por força

maior ou qualquer outra influência externa. Em caso de reclamações, reservamos o direito de reparar ou substituir as peças defeituosas ou substituir o dispositivo. As peças ou equipamentos substituídos passam a ser nossa propriedade. São excluídos todos os direitos a indemnização por danos, desde que não se baseie em dolo ou negligência grave pelo fabricante. Se, no entanto, o dispositivo evidenciar um defeito dentro do período de garantia, envie o comprovante de compra, mostrando exclusivamente na loja onde comprou o aparelho AMPLICOMMS. Todos os direitos de garantia ao abrigo destas disposições, só tem validade perante um distribuidor autorizado. Uma vez decorrido dois anos a partir da compra e entrega dos nossos produtos, cessam os direitos da garantia.

Declaração de conformidade

Este dispositivo cumpre com as exigências da directiva UE:

1999/5/CE Directiva sobre equipamentos radioelétricos e equipamentos terminais de telecomunicações e o mutuo reconhecimento da sua conformidade. A conformidade da directiva mencionada é confirmada pelo símbolo CE no dispositivo. Se deseja a declaração de conformidade completa, pode descarrega-la gratuitamente desde a nossa página web www.amplicomms.com



Indicações de garantia importantes

O período de garantia do seu producto AMPLICOMMS começa na data de compra. A garantia cobre defeitos de material ou fabricação. O direito de garantia extingue-se no caso de intervenção por parte do cliente ou por parte de terceiros não autorizados. É excluído da garantia qualquer dano originado por um tratamento ou manejo indevido, desgaste natural, instalação ou armazenamento inadequado, a conexão ou instalação incorrecta, assim como por força maior ou qualquer outra influencia exterior.

EM CASO DE GARANTIA PEDIMOS QUE SE DIRIJA EXCLUSIVAMENTE AO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ONDE COMPROU O DISPOSITIVO NÃO ESQUECENDO DE APRESENTAR A PROVA DE COMPRA.

A FIM DE EVITAR TEMPOS DE ESPERA DESNECESSARIAMENTE LONGOS, PEDIMOS QUE NÃO ENVIEM OS DISPOSITIVOS QUE SÃO OBJETO DE UMA RECLAMAÇÃO PARA A NOSSA DIREÇÃO DE OFICINAS.

Em caso de problemas técnicos pode contactar com nosso serviço de apoio telefónico. Encontrará o número de telefone na nossa página web **www.amplicomms.com**

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.amplicomms.com - Correio electrónico: info@audioline.de



4 250711 992293