



Parabéns por ter escolhido o amplificador de telefoneTA 10. Esta unidade é compatível com todos os telefones com cabo, interligáveis através do cabo de auscultador e de ligação. O TA 10 melhora e aumenta o som das chamadas telefônicas recebidas, facilitando assim a comunicação no caso de pessoas que sofram problemas auditivos.

Indicações de segurança

Cuidado: Este telefonepode reproduzir um nível de volume muito alto quando o amplificador está aceso e o controlo de volume está no máximo. Deve ter especial cuidado em mudar o volume entre utilizadores com audição normal e com perda auditiva.


- Leia com atenção este manual e guardeo para futuras consultas.
- Utilize apenas acessórios autorizados.
- Não utilize a unidade ao ar livre. Não coloque a unidade nas imediações de água, por exemplo, perto de uma banheira, máquina de lavar, lavalouças, em zonas húmidas ou perto de uma piscina.
- Desligue a unidade da tomada em vez de puxar pelo cabo.
- Não utilize o dispositivo caso o cabo, o conector ou a carcaça apresentem danos ou defeitos ou caso o dispositivo tenha caído. Se assim for entre em contacto como seu distribuidor, para o dispositivo ser verificado ou reparado.
- Utilize apenas as pilhas especificadas no manual ou a fonte de alimentação (não incluída) indicada no manual. Nunca deite as pilhas para o fogo, pois podem explodir.
- Caso seja necessário, utilize unicamente a fonte de alimentação recomendada (não incluída) e verifique se o acesso à fonte de alimentação não está obstruído por móveis ou outros objetos
- Evite utilizar o telefone durante uma trovoad. Existe orisco de descarga elétrica por impacto de raios.
- Nunca use o telefone nas proximidades de uma canalização com fuga de gás, caso pretenda avisar alguém sobre a ocorrência.

Finalidade do aparelho


Este dispositivo deverá ser ligado simultaneamente ao telefone através de cabo próprio e ao cabo do auscultador. Qualquer outro uso será desadequado. Não se permitem alterações nem modificações. Nunca tente abrir nem reparar o aparelho por sua iniciativa.

Instalação e funcionamento

1. Coloque uma pilha de 9 V (não incluída) no compartimento da pilha na parte inferior da unidade e ligue oTA 10 ao telefone da forma indicada. Se for necessário, utilize por exemplo uma moeda para abrir a tampa do compartimento da pilha. Utilize só o cabo de alimentação fornecido para a ligação entre o telefone e o TA 10. (**Nota:** não preste atenção ao indicador de funcionamento "on / off" durante a instalação, já que nesse momento é irrelevante)
Para sua segurança, desligue o TA 10 do telefone sempre que quiser mudar a pilha.

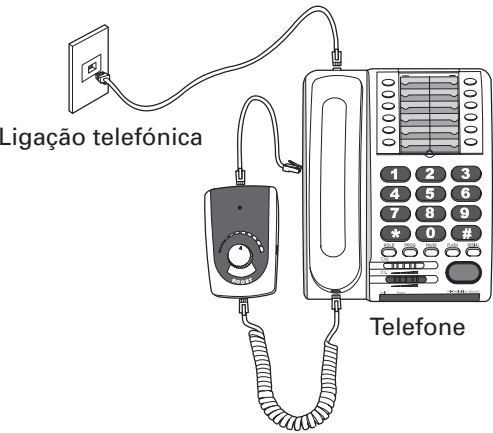

2. Desloque o controlo de volume para a posição central. Posicione o interruptor para ajustar o som na posição 2

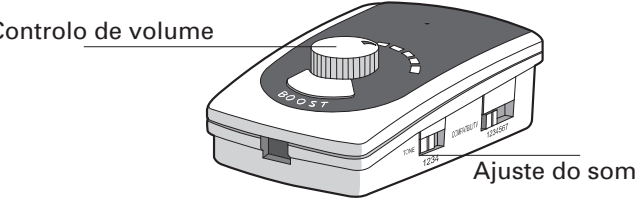


3. Ajustar interruptor de compatibilidade: Esta opção conta com sete posições. As posições de 1 a 6 servem para estabelecer a compatibilidade (ajuste telefónico). A posição 7 é um "by-pass" e não é aplicável às funções normais de ampliação. Esta posição pode ajustarse, por exemplo, para pessoas comum a audição normal ou se a fonte de alimentação do dispositivo deixa de funcionar (por exemplo, por pilha vazia).

Conteúdo da embalagem
Telefone amplificadorTA 10
Manual de instruções
Cabo de ligação

Elementos de controlo

1. Controlo de volume
2. Interruptor "On / Off"
3. Controlo de ajuste
4. Controlo de ajuste de tom
5. Entrada para o cabo do auscultador
6. Tecla BOOST e LED
7. Entrada para o cabo do telefone
8. Entrada para o aparelho de rede (não incluído)
9. Tampa do compartimento da pilha


O aparelho funciona com pilhas de 9V (não incluídas)

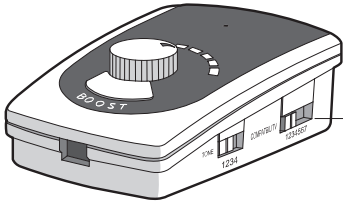


- A. Coloque o interruptor de compatibilidade na posição 1 (**Nota:** não preste atençãoao indicador de funcionamento "on / off" durante a instalação, já que nesse momento é irrelevante)
- B. Desligue o telefone e verifique se consegue ouvir o tom de marcação.
- C. Se o tom de marcação não se ouvir nitidamente, pouse novamente o auscultador e coloque o interruptor na posição seguinte, por exemplo 2. Repita o passo B.
- D. Se o tom se ouvir nitidamente, verifique se pode aumentar e baixar o volume do tom com o controlo do volume. Se funcionar, siga para o passo F.
- E. Senão conseguir mudar o volume, pouse o auscultador e mude o interruptor de compatibilidade para a posição seguinte. Repita o passo B.
- F. Faça uma chamada para verificar se ambos os interlocutores conseguem ouvir em condições.
- G. Se ficar satisfeito com a comunicação, a configuração terá sido completada com sucesso. Se for necessário, anote os passos a seguir para a configuraçãodo interruptor de compatibilidade. Siga parao passo 4.
- H. Senão ficar satisfeito com a comunicação, experimente outras posições do interruptor de compatibilidade até o resultado ir de encontro às suas expectativas. (**Nota:** Experimente as diferentes posições do interruptor até o sinal ficar alto e nítido.)

4. Durante uma conversa telefónica, pode aumentar ou diminuir o volume do auscultador girando o controlo de volume. (**Nota:** Se ouvir no telefone um apito desagradável diminua o volume).

5. Durante uma conversa telefónica, mude a posiçãodo interruptor para ajustar o som e saber qual é a posição que proporciona melhor qualidade de comunicação com seu interlocutor. Se ouvir no telefone um apito desagradável, diminua o volume. Mantenha estas indicações para referências futuras. Não será necessário alterálas. Se for necessário, anote estas indicações.

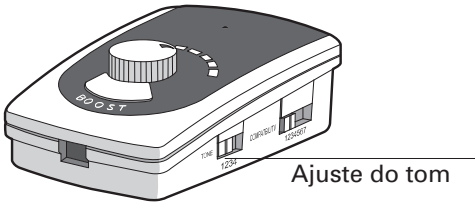



6. Mantenha a pressão no botão BOOST. Verifique se a voz do interlocutor se ouve mais forte e se as luzes do BOOST-LED estão acesas. Se desejar falar, deverá soltar o botão, pois enquanto mantiver a pressão no botão, não haverá transmissão de voz.

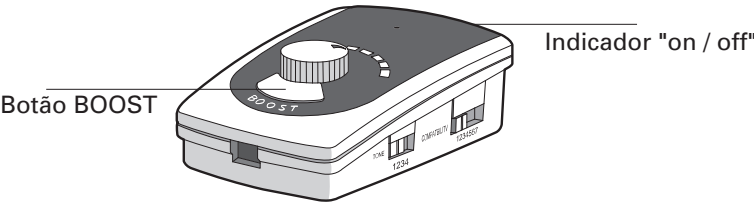

7. O indicador "on / off" acende durante a conversa telefónica. Desaparece 8 - 15 segundos depois de pousar o auscultador ou seja, se durante esses 8 – 15 não ouviu nenhum som/voz.

8. Com uma utilização média normal, a pilha alcalina de 9 V tem uma vida de 6 a 12 meses. Substitua a pilha quando o medidor "on / off" da mesma escurecer ou quando o tom do auscultador piorar.

9. Se desejar, poderá ligar uma fonte de alimentação de 9 V (não incluída). Esta fonte de alimentação fornece energia ao TA 10, e a pilha garante o fornecimento de energia em caso de apagão. Para garantir um bom funcionamento, deverá mudar a pilhade 2 em 2 anos. Mude também as baterias quando verificar que o medidor de pilha "on / off" não acende durante um apagão ou com o uso do telefone.

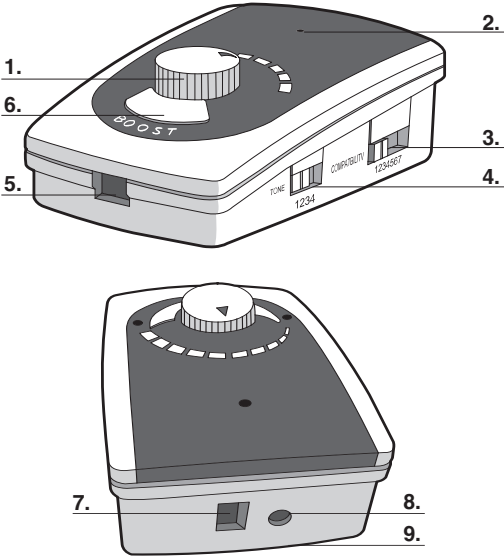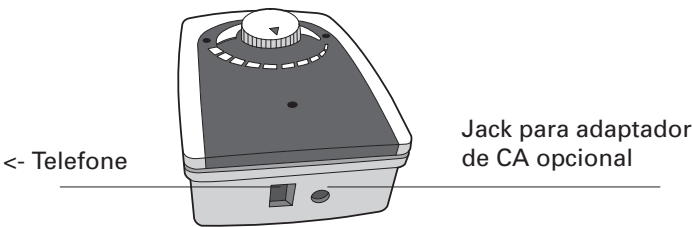

Solução de problemas e reparação

Se tiver problemas como seu telefone, consulte primeiro as seguintes instruções. Para as reclamações de garantia, entre em contacto com o seu distribuidor.

O prazo de garantia é de 2 anos.

- O medidor de pilha "on / off" não acende ou tem uma luz muito fraca: mude a pilha.
- Não consegue ouvir o tom de marcação nem o seu interlocutor, ou o interlocutor não o ouve: verifique a posição do interruptor de compatibilidade. Se for necessário, repita as indicações do ponto 3, de A a D.
- Apitos desagradáveis no auscultador: Baixe o volume ou mude a posição do interruptor para o ajuste do tom.

Especificações

Fonte de alimentação	pilha alcalina de 9 V (não incluída)
Consumo de corrente	10 mA (típico); desliga automaticamente quando não há voz
Duração dapilha	6-12 meses, consoante a duração do consumo
Amplificação sem BOOST	30 dB
Amplificação com BOOST	45 dB
Desliga automaticamente	Depois de 8/15 s em silêncio (Para poupar a pilha) (quando não há som / voz)
Posições de ajuste do interruptor	6 + "bypass", posição (7)
Mostrar	Indicador de funcionamento "on / off" e BOOST
Elementos de controlo:	Volume, BOOST, som, compatibilidade

Fonte de alimentação opcional 9 V DC, 300 mA (não incluída)

Temperatura ambiente para o funcionamento 0 a 45 ° C.
Temperatura de armazenamento -20 a 50 ° C.



Eliminação

A lei obriga o utilizador a desfazerse de forma adequada dos seus artigos de uso corrente. Este símbolo na parte lateral do aparelho significa que os dispositivos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos.

Deverá desfazerse dos dispositivos elétricos ou eletrónicos num ponto de recolha autorizado pelas autoridades. Deverá desfazerse das baterias no estabelecimento que comercializa as baterias ou no respetivo contentor de reciclagem em qualquer ponto de recolha autorizado. Desfaçase do material de embalagem de acordo com os regulamentos locais.

Instruções de manutenção

- Limpe as superfícies da carcaça com um pano suave e sem pelos.
- Não utilize detergentes ou dissolventes.

Garantia

Os dispositivos AMPLICOMMS são fabricados e verificados de acordo com os mais recentes métodos de produção. Os materiais selecionados e o uso de tecnologias avançadas garantem um funcionamento sem problemas e de longa duração. A garantia não se aplica nas situações causadas por mau funcionamento do dispositivo devido à companhia telefónica ou qualquer central privada ligada à rede pública. A garantia não se aplica às pilhas ou baterias utilizadas no produto. O período de garantia é de 24 meses a partir da data de compra. Durante o período de garantia, todos os defeitos materiais ou de fábrica serão resolvidos de forma gratuita. A garantia será nula caso o aparelho tenha sido manipulado pelo comprador ou por terceiros. A garantia não se aplica em caso de imperfeições ou danos causados por manuseamento inadequado do aparelho, pela rede de ligação, pela instalação ou pelo desgaste natural devido a uma manutenção e armazenamento inadequados do dispositivo ou por motivos de força maior ou influências externas. Em caso de reclamação, reservamos o direito de reparar as peças defeituosas, substituílas ou substituir o dispositivo. As peças ou o dispositivo substituídos ficaram na posse da nossa empresa. As reclamações por danos e prejuízos ficam excluídas, a não ser que se demonstre intencionalidade ou negligência grave por parte do fabricante. Se, durante o período de garantia, o dispositivo continuar a mostrar defeitos, entre em contacto unicamente com a loja onde adquiriu o dispositivo AMPLICOMMS, munido do seu recibo de compra. As reclamações de garantia conformes a estas disposições só serão válidas junto do distribuidor do produto. Os direitos de garantia perdem a validade quando termina o prazo de garantia de 2 anos.

Declaração de conformidade

Este dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva da UE: Diretiva 1999/5/CE sobre equipamentos radioelétricos e terminais de telecomunicação e reconhecimento mútuo da sua conformidade. A conformidade com a diretiva referida anteriormente é confirmada pelo símbolo CE que aparece no dispositivo. Poderá descarregar gratuitamente a declaração de conformidade completa no nosso site www.amplicomms.com

